

歯科材料（09） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN 70901000

ファイバードиск

【形状・構造および原理等】

形状・本体



FDD2203



SAD2203



FSD3807

寸法及び質量

FDD2203 直径 22mm 厚さ 0.3mm 3g

SAD2203 直径 22mm 厚さ 0.3mm 3g

FSD3807 直径 38mm 厚さ 0.7mm 10g

【使用目的、効果】

ディスクで技工物の研削を行う

【使用方法等】

- 1) マンドレールなどにしっかりと装着して使用してください。使用時には保護メガネを着用すること
- 2) 端面が暴れないよう、加工物をしっかりと保持すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ① 使用時に異常を感じた際には、すぐに作業を中止してください。

2) 気を付けること

①許容回転数 10000rpm を厳守してください。

②本品は、【使用目的、効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

3) 重要な基本的注意

①取扱説明書をよく読み、それに従って作業してください。

②作業時には所定のマスク、作業着を着用してください。

③切子、粉を吸い込まないように注意してください。

④電力が安定していない環境での使用は控えてください。

【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 本品は、錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地

錦町一丁目ビル 3 階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129