

2025年2月13日
2025年10月22日（第2版）

歯科材料 9 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 70907000

一般医療機器
シャモアホイール

【形状・構造及び原理等】

形状：円盤状
直径：90mm
穴径：9mm



【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

【使用目的】

補綴物等の研磨に用いる。

【操作方法、使用方法等】

歯科用レーズなどに装着して使用する。

【包装】

1枚単位で梱包

【製造販売業社及び製造業者の氏名又は住所等】

アルゴファイルジャパン株式会社
住 所：〒101-0054
東京都千代田区神田錦町一丁目7番地
錦町一丁目ビル3階
T E L：03-3233-1133
F A X：03-3233-1129

【使用上の注意】

- ①レーズメーカーの指示に従って、バフの装着を確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、異常がないことを確認する。
- ③繊維の長いもの、大きい形状のものは、絡まったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を越えて使用しないこと。
- ⑤目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥変形、損傷（繊維の長いもの、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦本材は（性能、使用目的、効能または効果）の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑨本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。