

2026年3月19日

医療機器届出番号：13B2X10121000181

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器


パワーポリッシャー

(形状・構造および原理等)

■ パワーポリッシャー スティック



※マンドレルは別売です

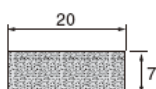

ERP2071

(10本)

ERP2171


(100本)

■ パワーポリッシャー ホイール



パワーポリッシャーはハイブリッドレジン、セラミック、チタン、アバットメント、メタルボンド、金属はなんでもOK。コバルト、貴金属も大丈夫です。

ヒートレスホイールやカーバイドバーの粗仕上げ後の中仕上げ向けホイールです。パワーポリッシャーホイールの後はレースやシリコンで簡単に最終仕上げが可能です。

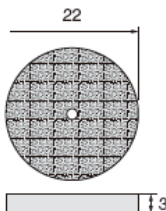

ERP2051

(10枚)

ERP2151

(100枚)

(使用目的)

補綴物等の切削に用いる。

(操作方法、使用方法等)

歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

(使用上の注意)

- ① ハンドピースメーカーの指示に従い、確実に機器へ装着し、緩んでいないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常がないことを確認すること。
- ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、ハンドピースから外れる場合があるため、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定(製品の被包に記載)の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷(表面傷、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

(貯蔵・保管方および使用期間等)

・水分、腐食性およびその上記の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。

・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

(包装)

ERP2071 10本入1パック

ERP2171 100本入1パック

ERP2051 10枚入1パック

ERP2151 100本入1パック

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129