


2026年3月19日

医療機器届出番号：13B2X10121000182

歯科材料 9 歯科用研削材料
歯科用研削器材 70908000
一般医療機器
プレポリッシャーホイールプラス

(形状・構造および原理等)

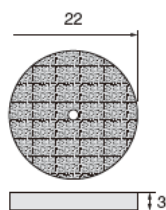

(使用目的)

補綴物等の切削に用いる。

(操作方法、使用方法等)

歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

(使用上の注意)

- ① ハンドピースメーカーの指示に従い、確実に機器へ装着し、緩んでいないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常がないことを確認すること。
- ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、ハンドピースから外れる場合があるため、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定(製品の被包に記載)の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷(表面傷、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

(貯蔵・保管方および使用期間等)

- ・水分、腐食性およびその上記の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

(包装)

100枚入1パック

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129