


2026年5月1日

歯科材料 9 歯科用研削材料
 歯科用研磨器材 70907000
 一般医療機器

スピアナイト

【形状・構造および原理等】

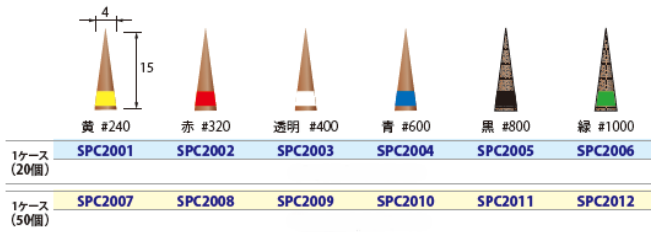

【使用目的】

軟質、硬質金属（ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金等）の補綴の研磨に用いる。

【操作方法、使用方法等】

マンドレールを使用し、マイクロモーター等に装着して使用する。

【使用上の注意】

- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材は、使用目的の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑨ 再使用する際には必要に応じ、消毒剤・滅菌器・清掃液を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブ、乾熱または EOG による滅菌もしくは薬剤による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。また、消毒剤・滅菌器・清掃液については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。
- ⑩ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

【包装】

SPC2001～SPC2006 20 個入 1 パック
 SPC2007～SPC2012 50 個入 1 パック
 ビニールパッケージで梱包

【製造販売業社及び製造業者の氏名又は住所等】

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地
 錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129