

2010年5月25日

医療機器届出番号：13B2X10121000209

2025年10月22日（第2版）

歯科用研削材料

2026年4月7日（第3版）

歯科技工用アブレイブ研削器具

70550000

一般医療機器

軸付砥石

【形状・構造及び原理等】

⑨

なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。また、消毒剤・滅菌器・清掃液については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

【包装】

12本単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名または住所等】

アルゴファイルジャパン株式会社

〒：101-0054

住所：東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

【使用目的】

対象物の研削作業に用いる。

【操作方法、使用方法】

- ①ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認する。
- ③頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を越えて使用しないこと。
- ⑤目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦本材は（性能、使用目的、効能または効果）の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

