

2026年5月（第1版）

器 25 医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

## 内視鏡用アダプタ

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】


## 1. 使用方法

・再使用・再滅菌禁止 [本品の品質の劣化、患者への感染の恐れがある]

## 【形状・構造及び原理等】

本品は、単回使用の滅菌医療機器であり、専用の内視鏡と併用して使用する。

## 1. 形状・構造（代表的写真）

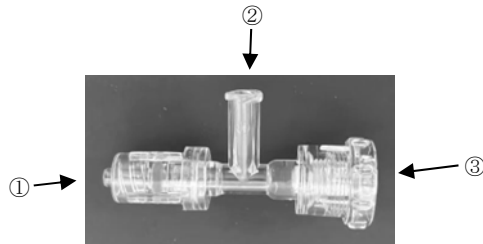

①接続部、②送水口、③鉗子口

## 2. 材質：ポリカーボネート

## 【使用目的又は効果】

本品は、複数の内視鏡部品を接続・統合して完全な内視鏡アセンブリを作製するために用いるパーツである。

## 【使用方法等】

&lt;使用方法例&gt;

1. 本品を滅菌包装より取り出す。
2. 専用の内視鏡（販売名：MINDSION ディスポーザブルウレテロレノスコープ、認証番号：308ALBZX00006000）のインジェクションポートに本品の接続部側を接続し、時計回りに回転させ固定する。
3. 鉗子口から内視鏡用処置具を挿入する。
4. 送水器具に接続された送水チューブ等の送水手段を送水口に接続する。
5. 送水器具を操作し、送水を行う。
6. 病院の適切なガイドラインに従って、環境に配慮した方法で本品を廃棄すること。

&lt;使用方法等に関連する使用上の注意&gt;

1. 使用前に全ての接続部分の接続が確実であることを確認すること。[接続が不十分な場合、漏れや十分な性能が得られない場合がある]

## 【使用上の注意】

&lt;重要な基本的注意&gt;

1. 滅菌包装に破れ等異常がないこと、および滅菌有効期間内であることを確認すること。本品に破損、変形等がみられる場合は使用しないこと。

## &lt;不具合・有害事象&gt;

不具合

1. その他の不具合  
製品の損傷、接続不良、リーク

有害事象

1. 重大有害事象  
感染

## 【保管方法及び有効期間等】

&lt;保管方法&gt;

直射日光を避け、医療機関における滅菌済み医療機器の保管方法に従い、保管すること。

&lt;有効期間&gt;

本品の包装の表示ラベルに記載のとおり [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社アダチ

大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番10号

TEL：06-6942-3371

製造業者

Zhuhai Vision Medical, Technology Co., Ltd.

シュカイ ビジョン メディカル テクノロジー

中華人民共和国