

** 2023 年 9 月 改訂 (第 9 版)
* 2019 年 11 月 改訂 (第 8 版)

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001

SET パック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

*本製品は、下の表に示す構成部品を組み合わせて構成する。

* (構成部品)

	部品名
1	救急絆創膏
2	コットンボール
3	不織布
4	込めガーゼ
5	オリガーゼ
6	脱脂綿
7	被覆材
8	ピンセット
9	綿棒
10	手袋
11	医療用スポンジ
12	固定テープ
13	固定用円筒

* (付属品)

	部品名
1	シーツ
2	ダストバッグ
3	薬色紙
4	*カデハス
5	*メスルーキャップ
6	*PVC チューブ
7	*セパレーター

【使用目的又は効果】

本品は、一般的な処置（消毒、止血等）に使用し、迅速な処置、利便性のために必要な医療機器を予め組み合わせたセットである。

【使用方法等】

- ・トレイから滅菌紙を剥がし、収納されている品目を用いて、創面の処置、被覆、保護を行う。
- ・本品はディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- ・救急絆創膏及び粘着テープの使用により、発疹・発赤、かゆみ等の異常が生じた場合には、使用を中止して下さい。
- ・使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で処分して下さい。
- ・処置を行う上で不足している器材があれば、あらかじめ準備をしておいて下さい。
- ・本品を落としたり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますので、取扱いに注意して下さい。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせたりしないように取り扱って下さい。
- ・開封後、使用しなかった構成部品は廃棄して下さい。
- ・滅菌保持包装の開封後の操作は全て、無菌的に行って下さい。
- ・紙軸綿棒を消毒液に長時間浸した状態で放置しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温、多湿、直射日光を避け、清潔に室温で保管して下さい。
- ・水濡れに注意して保管して下さい。
- ・至近距離での蛍光灯下、紫外線殺菌灯下やオゾン発生器の周辺等に保管しないで下さい。

2. 有効期間

- ・有効期間：製造日より 3 年間（自己認証による）

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 株式会社アグリス 販売 ニプロ株式会社
福岡県八女市鶴池 477-1
TEL 0943-30-1177