

\*\*2021年10月（第4版）


\* 2021年07月（第3版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000

## アグリス鉗子

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状（代表例）

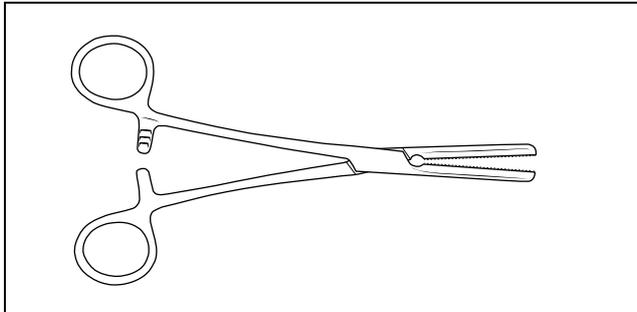

#### 2. 原材料

ステンレス鋼

#### 3. 原理

先端部の2つの咬み合い部によって、把持、結合、圧迫又は支持する。ラチェット部が重なるとロックがかかり、重なる度合いが大きいほど、先端部の閉じる圧力は強くなる。

### \*【使用目的又は効果】

チューブを遮断するか、つまむための器具をいう。通常、検査室で使用するが医療施設で使用する汎用のものもある。本品は再使用可能である。

### 【使用方法等】

1. 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
2. ハンドルを操作し、チューブを遮断もしくはつまむ。
3. ラチェットを開閉してロックする。

### 【使用上の注意】

#### \*〈重要な基本的注意〉

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命が著しく低下する。
  2. 一度閉じたラチェット部を開くとき、構造上一度閉じる方向に戻した後開くこと。
  3. 本品は未滅菌のため、必要に応じて洗浄、滅菌等を行うこと。
- \*\*4. 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- \*\*5. 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### \*〈保管方法〉

1. 水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温で保管すること。
- \* 2. 器具に機械的負荷を加えた状態で保管しないこと（ラチェット部は、開いた状態にしておく）。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス  
福岡県八女市鶴池 477-1  
TEL 0943-30-1177