

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000
セレクトタフバン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

*** 【形状・構造及び原理等】**

〈形状〉

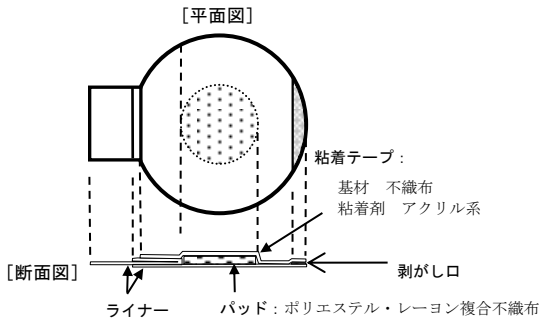

品番	寸法	
	テープ部	パッド部
No. 30	直径 30mm	直径 10mm
No. 36	直径 36mm	直径 16mm

〈構造〉

本品は、接着剤を塗布した布製の絆創膏材にパッドを付したものである。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

滅菌袋から本品を取り出し、創部にパッド部分を当て、周囲のテープで固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品使用中に皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）が生じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に創傷部位に感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液等のにじみが見られた場合、直ちに新しいものと貼り替えること。

2. その他の注意

- ・本品を剥がす際は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

*** 1. 保管方法**

- ・高温・多湿、直射日光及び紫外線の当たる場所を避けて室温にて保管すること。
- ・水濡れに注意。

*** 2. 有効期間**

- ・外箱に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*** 〈製造販売元〉**

株式会社アグリス
〒834-0055 福岡県八女市鵜池 477-1
TEL 0943-30-1177