

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

サージカルドレープAG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>


再使用禁止

再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に患者の体の一部分を覆う製品である。表面：クレープ紙/裏面：ラミネートフィルムの二層構造を有する。手術部位を露出させるための穴があいている。

[平面図]

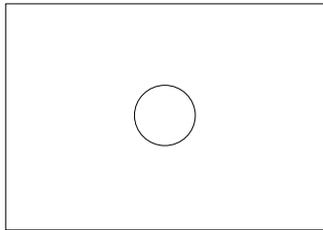

【組成】

名称	材質
覆布部	ポリエチレン、クレープ紙

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ①本品を包装より取り出す。
- ②本品を展開し、処置部位が穴の中心にくるように患者へかぶせる。このとき、ポリエチレン面が患者側になるようにする。
- ③使用後は、再使用せず廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・使用する前に破損がないかを確認すること。
- ・本品の再滅菌は行わないこと。
- ・高温を発する機器類に接しないように注意すること。
- ・本品を開封後は直ぐに使用すること。使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
- ・本品使用中に皮膚障害(発疹・発赤・かゆみ等)が生じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・可燃性消毒剤を用いる場合は、消毒剤の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと[乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある]。
- ・ポリエチレン部は、水分量あるいは衝撃によって溶液あるいは血液が素材を通り抜ける場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温・多湿、直射日光及び紫外線の当たる場所を避けて室温にて保管すること。
- ・水濡れに注意すること。

2. 有効期間

- ・滅菌後3年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>

株式会社アグリス

〒834-0055 福岡県八女市鶴池 477-1

TEL 0943-30-1177