

再使用禁止

アルゴドレープ

**【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

*【形状・構造及び原理等】

[製品の種類]

タイプ	概要
N吸水	吸水性のある基布にラミネート加工を施し、防水性を高めた不織布であり、二層のものと三層のものがある。
H撥水	撥水性スパンレース不織布であり、単層である。
H吸水	吸水性のある基布にラミネート加工を施し、防水性を高めた不織布であり、二層である。
F	透明なポリエチレン製のフィルムであり、単層である。
S	吸水性のある基布にラミネート加工を施し、防水性を高めた不織布であり、二層である。
Y	透明なナイロン製のフィルムであり、単層である。

[寸法]

幅 : 480 mm~2500 mm

長さ : 400 mm~4500 mm

[材質]

タイプ	原材料
N吸水(二層)	ナイロン不織布、ポリエチレンフィルム
N吸水(三層)	ナイロン不織布、ポリエチレンフィルム、ナイロン不織布
H撥水	パルプ/ポリエステル不織布
H吸水	パルプ/ポリエステル不織布、ポリエステル/レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
F	ポリエチレンフィルム
S	レーヨン不織布、レーヨン/ポリエステル/ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム
Y	ナイロンフィルム

**【使用目的又は効果】

本品は、手術室や処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離し、患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギー等から、保護的にカバー又は障壁として用いる。

**【使用方法等】

1. 本品を包装袋外側と接触しないように取り出す。
2. 本品で患者の体表面を覆う。開窓部のあるものは、開窓部から外科切開部位や術野が露出するようにする。
3. 清潔な保持材料を用いて固定する。
4. 手技が完了したら本品を外し、医療施設の所定手順に従い廃棄する。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品は、タイプによって粘着材を使用しているものがあり、患者の個人差で粘着材による皮膚刺激性が僅かながら発生する可能性がある。患者の皮膚に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

**【保管方法及び有効期間等】

[有効期間]

- ・本品の包装に記載されている「有効期限」までに使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

アルゴキュアシステム株式会社

愛知県豊田市屋敷198番地2

TEL 0565-51-0533

[製造業者]

株式会社ララ

〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院161番地