

再使用禁止

アルゴ薬液調製デバイス

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。


か破損の恐れがある。]

【形状、構造及び原理等】

構成部品、構成品を接続、組み合わせて製造販売する。本品は滅菌後、単回使用である。

本品の構成品の一部には、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）を使用しています。

基本形状

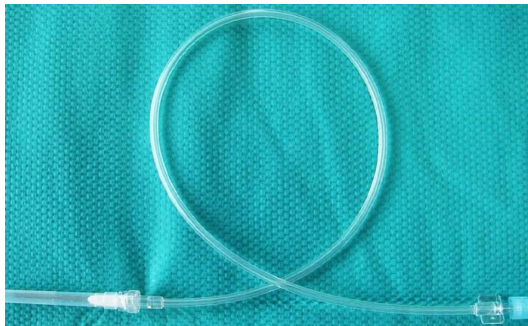

【使用目的又は効果】

本品は、薬液を容器から他の薬液容器に移すために使用する。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋等を着用する。
2. 本品のびん針、採液針を、薬液ビンまたは輸液バッグ等の孔にまっすぐに根元まで穿刺する。（必要に応じてびん針のエアークリップを開ける。）
3. コネクタ（メス）のルーア接続箇所にシリンジもしくはオスルーアを有する機器を接続する。
4. 薬液を本品に通し、薬液ビンまたは輸液バッグ等に移送、注入、排液する。
5. 使用後も閉鎖系を保つため輸液バッグ等を接続したまま、廃棄すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・本品の構成品の一部に原材料に「ポリカーボネート」を使用しており、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤の投与時に、「ポリカーボネート」の構成品を使用しない及び触れさせないこと。【構成品

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【使用期間（耐用期間）】

包装に記載（自己認証による）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

【製造販売業者】

アルゴキュアシステム株式会社

〒473-0924 愛知県豊田市花園町屋敷 198 番地 2

TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528

ホームページ <http://www.argocs.co.jp/>

【製造業者】

株式会社長谷川綿行 師勝工場

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

ホームページ <http://www.hasemen.co.jp/>