

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 (JMDNコード:70904000)

エアフローパウダー レモン

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1) 歯肉、充填物、架工義歯及びクラウンに直接噴射しないこと。[損傷を起こす恐れがある。]
- 2) 軟組織や歯肉溝に向けて噴射しないこと。[気腫を発生させた事例が報告されている。]

<適用対象(患者)>

- 以下の患者には使用しないこと。
- 1) 本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある場合。
 - 2) 呼吸器疾患がある場合。[エアと粉末の噴射により呼吸困難を引き起こす恐れがある。]
 - 3) 口腔内に傷や出血、炎症等の異常が認められる、又はその疑いがある場合。[痛み、不快感、知覚異常、不適切な傷治療が起こる可能性がある。]
 - 4) 低塩食又は高血圧症がある場合。[本品には炭酸水素ナトリウムが含有されているため。]

【形状・構造及び原理等】

本品は、白い粉末状の研磨材であり、歯面の清掃に用いる。

成分：炭酸水素ナトリウム、シリカ、香料

性状：粉

最大粒子径：200µm

【使用目的又は効果】

電動式歯面清掃用装置等と使用することにより歯面を清掃する。

【使用方法等】

- 1) 使用前にボトルをよく振る。
- 2) 本品を電動式歯面清掃用装置等に補充し、歯面の清掃に使用する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- 1) 電動式歯面清掃用装置等は装置メーカーの指示に従って、使用すること。
- 2) 本品は吸湿しやすいため固まる恐れがあり湿気にさらさないこと。
- 3) 使用後はボトルの蓋をしっかりと閉めること。
- 4) 均一にするために使用前にボトルは必ず振ること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本品を使用して清掃する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡を使用すること。
 - ② 本品を使用する術者はグローブとマスクを使用すること。
 - ③ 本品を使用する場合はバキュームを行うこと。
 - ④ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
 - ② 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
 - ③ 本品が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
 - ④ 本品を飲み込んだ場合には、水で口を洗浄し、大量の水を飲むこと。もし気分がすぐれない場合は、医師の診察を受けること。
 - ⑤ 口腔軟組織や皮膚に付着した場合は、綿球等で拭いた後、大量の水で洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管温度 : 30℃以下
保管湿度 : 90%以下
直射日光を避けて保管すること。

有効期間

・製造日より36ヶ月
(プラスチックボトルに記載)

【包装】

- ・300g入 4本/箱
- ・300g入 1本/袋(※)
- ・20g入 1本

※：下記認証品目の構成品目としてのみ提供される。

| 販売名 | 認証番号 |
|-----------------------|------------------|
| エアフロー ワン | 230ALBZI00002000 |
| エアフロー プロフィラキシスマスター | 230ALBZI00001000 |

選任製造販売業者：株式会社 ICST

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

業者名： 株式会社 ICST
住所： 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目
17-1 S-4 タワー
電話番号： 048-857-8026

外国製造業者

業者名： E.M.S.ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.
(イーエムエス エレクトロ メディカル システムズ)
国名： スイス