

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】*

〈概要〉

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料の取り扱いに使用する手袋である。

本品は主に塩化ビニル樹脂製で、左右兼用、パウダーフリーである。また、本品は未滅菌の単回使用手袋である。

〈形状・構造等〉

本品は下表のとおり、4サイズがある。



寸法：mm（±10 mm）

サイズ	S	M	L	XL
全長	≥240			
掌幅	80	95	110	≥110

〈原理〉

検査、検診、治療行為を行う際及び汚染された医療材料を取り扱う際に、本品を着用することにより、患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋である。

【使用方法等】

1. 個箱の取出口から本品を1枚取り出し、手首部分にあたるカフ上端表面のみを持ち、着用する。
2. 2枚目の着用の際に、本品を着用した手でもう片方の手の皮膚に触れないように、折りたたまれたカフを開き着用する。
3. 使用后、片方の本品を手首の高さでつまんで、皮膚に触れないように取り外し、本品を裏返しにする。
4. 本品を着用している手で取り外した本品を持ち、着用している側の手首と本品の間に指を差込み、本品を裏返ししながら取り外し、先に取り外した本品を包むように折り込む。
5. 取り外した本品を廃棄する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・本品の着用前後に、手を必ず消毒すること。
- ・本品の外側は皮膚に接触しないように着用すること。
- ・必要に応じて、本品を2枚重ねて使用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・適切なサイズを選択し、使用すること。
- ・本品に穴、破損、損傷等がないことを確認してから使用すること。
- ・指輪・アクセサリーを外してから使用すること。
- ・爪先、刃物等、とがったものなどに触れると本品が破れたり、穴が開くことがあるので、注意すること。
- ・使用中に穴、破損、損傷等の異常が認められた場合は、直ちに使用中止し、新しいものに交換すること。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】*

〈保管方法〉

- ・直射日光、高温を避けて、涼しく乾燥した環境で保管すること。
- ・5°C~38°Cの室温に保管すること。

〈有効期間〉

製造日より5年[自己認証(外国製造業者データ)による]

※製造日は個装に記載あり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

〈製造販売業者〉

業者名：株式会社 ICST

TEL：048-857-8026

〈外国製造業者〉

業者名：Intco Medical Technology Co., Ltd.

国名：中華人民共和国