

医療用品 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (70976000)

再使用禁止

検査・検診用ニトリル手袋

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】\*

〈概要〉

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料の取り扱いに使用する手袋である。

本品は主に合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）製で、左右兼用、パウダーフリーである。また、本品は未滅菌の単回使用手袋である。

本品は XS、S、M、L、XL の 5 サイズがあり、各サイズに質量により 5 種類がある。なお、各種類には 4 色（バイオレット、ブルー、ホワイト、ブラック）のカラーバリエーションがある。

〈形状・構造等〉

本品のサイズおよび種類の詳細は下表のとおりである。

（以下ブルーの手袋の写真本品の代表として扱う。）



寸法：mm（±10 mm）

質量：g（±0.3g）

| サイズ |   | XS   | S   | M   | L   | XL  |
|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|
| 全長  |   | ≧230 |     |     |     |     |
| 掌幅  |   | 75   | 85  | 95  | 110 | 120 |
| 質量  | ① | 2.6  | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
|     | ② | 2.8  | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
|     | ③ | 3.0  | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|     | ④ | 3.5  | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
|     | ⑤ | 4.0  | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |

〈原理〉

検査、検診、治療行為を行う際及び汚染された医療材料を取り扱う際に、本品を着用することにより、患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋である。

【使用方法等】

1. 個箱の取出口から本品を取り出し、手に着用する。本品は左右共通のデザインになっているので、自分の手型仕様に合ったものを使用すること。
2. 取り外した本品を廃棄する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・本品の着用前に、内側に手の皮膚を密着し、表面に損傷がないか確認すること。
- ・本品の外側は皮膚に接触しないように着用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・適切なサイズを選択し、使用すること。
- ・使用前に本品に穴、破損、損傷等がないことを必ず確認すること。異常が認められる場合は使用せず、使用中に異常が発生したときは直ちに使用中止し、新しいものに交換すること。
- ・指輪やアクセサリ、付け爪などを外してから使用すること。
- ・爪先、刃物等、とがったものなどに触れると本品が破れたり、穴が開くことがあるので、注意すること。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には直ちに使用中止し、医師に相談すること。
- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透、変質したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・直射日光、高温を避けて、涼しく乾燥した環境で保管すること。
- ・室温に保管すること。

〈有効期間〉

製造日より 5 年[自己認証(外国製造業者データ)による]

※製造日は個装に記載あり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

業者名：株式会社 I C S T

T E L：048-857-8026

〈外国製造業者〉

業者名：Intco Medical Technology Co., Ltd.

国 名：中華人民共和国