

2026 年 7 月作成（第 1 版）

届出番号：11B1X10017000096

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（34713000）
（一般医療機器 歯科用研削器材（70908000））
アルムジャパン ARUM A1CS

【禁忌・禁止】


1. 本製品を使用目的以外に使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
3. 本製品の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

<概要>

本製品は、歯科および技工所用コンピュータ支援設計(CAD)／コンピュータ支援製造(CAM)システムで生成された数値制御(NC)加工データを使用して、ジルコニア、PMMA、ガラスセラミック等の歯科補綴用材料を 4 軸制御方式で湿式加工する精密ミリング装置である。

<形状・構造等>

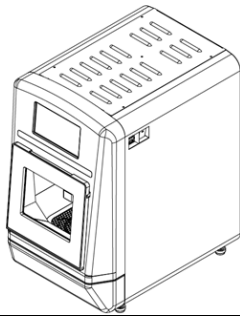

寸法公差：±0.2mm

質量公差：±3kg

寸法	400mm (W) ×605mm (H) ×684mm (D)
質量	85kg
最大スピンドル回転数	100,000rpm
軸	4 軸

<電氣的定格>

定格電源電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
定格入力	3.5A
電撃に対する保護の形式による分類	クラス I 機器

<構成品>

- ・ミリングバー※
- ・電源コード
- ・専用ソフトウェア（USB）
- ・切削油
- ・切削油濃度測定器
- ・Torque Drive ハンドル
- ・Torque Drive アダプター
- ・ソケットアダプター
- ・ハンドソケットキングトニー

※構成医療機器として組み合わせる一般医療機器

一般的名称	販売名	届出番号	製造販売業者
歯科用研削器材	アルムジャパン ARUM ミリングバー	11B1X10017000094	株式会社 I C S T

<原理>

本製品は、CAD／CAM システムで生成された NC 加工データに基づき、工具の回転および位置制御を行うことにより自動加工を行う。高速スピンドルと多軸ステッピングモーターにより材料を切削し、歯科補綴用材料を精密に加工する。

【使用目的又は効果】

本製品は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物の CAD 又は CAM に用いる。

【使用方法等】

事前準備詳細は取扱説明書をよく読むこと。

- 1)各機器の電源コードをコンセントに差し込み電源スイッチを入れる。
- 2)制御用 PC を稼働させ、CAD／CAM 制御プログラムを立ち上げる。
- 3)本体と制御用 PC との通信状態を確認する。
- 4)本体扉を開き、ミリングバー及び切削材料を取り付ける。
- 5)加工ファイルデータを読み込み、切削加工を行う。
- 6)切削加工終了後、CAD／CAM 制御プログラムを終了し、本体の電源スイッチを切る。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 歯科医療従事者術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
2. 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
3. 可燃性ガスの付近では設置、使用をしないこと。
4. 作動時は必ず扉を閉め、スピンドルや駆動部品に触れないこと。
5. 使用後は本体を十分に清掃すること。
6. 切削粉の除去や切削液ノズルの位置調整は、本体が停止している状態で行うこと。
7. 【保守・点検に係る事項】を参照し、保守・点検を行うこと。
8. 販売業者が指定した構成品・付属品以外を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

項目	温度	相対湿度（非結露）
動作時	15～35℃	10～80%
保管時	0～45℃	

使用高度：2,000m 未満

1. 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
2. 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
4. 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

＜耐用期間＞

6 年[自己認証 (ARUM DENTISTRY 社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

詳細については取扱説明書を参照すること。

1. 必ず定期的に点検を行うこと。
2. しばらく使用してない状態の後再度使用する場合は、必ず各部の作動確認を行ってから使用すること。
3. 故障した際は、取扱説明書に明示された範囲で適切な措置を行い、販売元に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

業者名：株式会社 I C S T

T E L ： 048-857-8026

＜外国製造業者＞

業者名：ARUM DENTISTRY Co., Ltd.

国 名：大韓民国