

ファットパッド・レトラクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】


(使用方法)

1. 再滅菌禁止、再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

1) ファットパッド・レトラクター

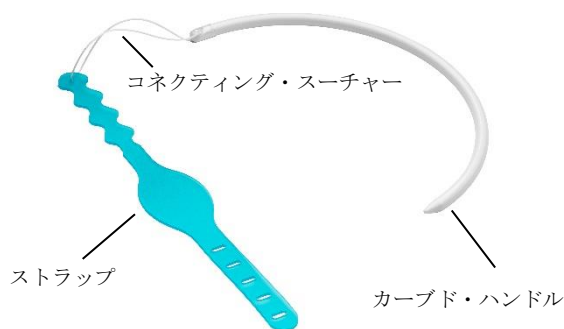

2. 原材料

ストラップ：	ポリウレタン
コネクティング・スーチャー：	ポリエステル
カーブド・ハンドル：	ポリカーボネート

3. 原理

本品は、組織又は他の解剖学的構造の持ち上げ、配置に用いる手術機器である。ストラップでループを作ることで、ループ内の目的の組織等を挙上し、空間を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は、組織又は他の解剖学的構造の持ち上げ、配置に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

使用例：膝関節鏡下手術

- 1) カーブド・ハンドルを1つのポータルに挿入する。
- 2) 膝蓋下脂肪体の周辺を通過させ、カーブド・ハンドルを別のポータルに通す。
- 3) カーブド・ハンドルを引き、ストラップを関節内に通す。
- 4) カーブド・ハンドルをストラップの適切なスロットに通す。
- 5) ストラップのループを所望の張力で固定して、膝蓋下脂肪体を引き上げる。
- 6) カニューラ※を標準的な方法で、ポータルに挿入する。

※本品に含まれない

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を通す際に、過度な抵抗を感じた場合は、挿入を中断し、無理な挿入は行わないこと[本品が破損する可能性がある]
- 2) 鋭利な器具や高温の電極を接触させないこと[本品が破損する可能性がある]

る可能性がある]

- 3) 本品に過剰な負荷がかかるような操作は行わないこと[組織の損傷や裂傷又は本品が破損する可能性がある]
2. 不具合・有害事象
 - 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の変形・破損
 - 2) 重大な有害事象
 - (1) 感染症
 - (2) アレルギー反応・異物反応
 - (3) 血腫
 - (4) 血管・神経損傷
 - (5) 創傷治癒の遅れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱いおよび保管に注意すること。
- 2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

ラベルまたは包装に表示[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：	Arthrex Japan 合同会社
電話	： 03-4578-1000
製造元	： アースレックス社（アメリカ合衆国） Arthrex, Inc.

