

サクシヨン・アダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

（使用方法）

1. 再滅菌禁止、再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
 - 1) サクシヨン・アダプター



2. 原材料
ポリカーボネート

3. 原理
本品は、内視鏡用処置具等に接続し、吸引チューブへの接続を可能にするために用いるコネクタである。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡用処置具等に接続し、吸引チューブへの接続を可能にするために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 本品の処置具コネクタに内視鏡用処置具等*を接続する。
 - 2) 本品の吸引チューブ・コネクタに吸引チューブ*を接続し、吸引操作を行う。

※本品に含まれない

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品を接続する際に、過度な抵抗を感じた場合は、接続を中断し、無理な接続は行わないこと[本品が破損する可能性がある]
2. 不具合・有害事象
 - 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の変形・破損
 - 2) 重大な有害事象
 - (1) 感染症
 - (2) アレルギー反応・異物反応
 - (3) 血腫
 - (4) 血管・神経損傷
 - (5) 創傷治癒の遅れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱いおよび保管に注意すること。
 - 2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔

な場所に保管すること。

2. 有効期間
ラベルまたは包装に表示 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： Arthrex Japan 合同会社
電話 : 03-4578-1000
製造元 : アースレックス社（アメリカ合衆国）
Arthrex, Inc.

