

【A-65A-R2】

\*2026年3月（第2版）

2026年1月（第1版）

届出番号：13B1X10093250003

機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ（JMDNコード：70469000）

## ElbowLOC Arm Positioning システム（滅菌済品用）

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

##### <使用方法>

1. 再使用禁止。

#### \*【形状・構造及び原理等】

1. 形状

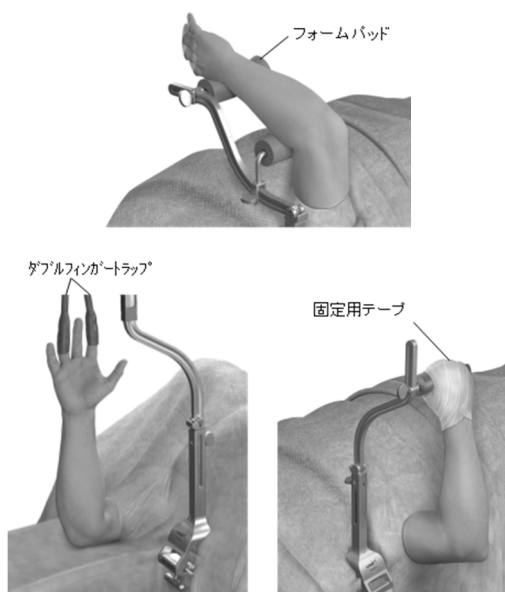

2. 作動・動作原理

本品を手術台に取り付けて使用することで、患者の上肢を意図した位置に固定する。

#### 【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は手術台に用いる付属品である。患者の上肢を意図した位置に固定する。

#### 【使用方法等】

1. 使用前の注意事項

使用直前に開封し、開封後は直ちに使用すること。また、製品及び包装に破損等が見られる場合は使用しないこと。使用後は感染に注意して取扱い、廃棄すること。

2. 使用方法

本品を使用し、患者の上肢を意図した位置に固定する。

詳細については該当する手技書を参照すること。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 使用時に衝撃や必要以上の力を加えないこと〔患者へのダメージ又は本品が破損するおそれがある〕。

#### 【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合

- (1) 製品の変形・破損
- (2) 固定の緩み・外れ

- 2) 重大な有害事象

- (1) 固定の緩み・外れによる怪我
  - (2) 長時間の姿勢固定による神経障害
- 3) その他の有害事象
  - (1) 固定部位の皮膚の損傷

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れないよう注意し、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

ラベルまたは包装に表示

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : Arthrex Japan 合同会社

電話 : 03-4578-1000

製造元 : アースレックス社（アメリカ合衆国）  
Arthrex, Inc.



手術手技書を必ずご参照ください。