

- (9) 本品は、Anterior-Posterior 位置（前胸部－後背部）に貼付すること。前胸部－後背部に貼付することができない場合に、前胸部－前胸部への貼付を禁止・禁忌するものではないが、この場合には2つの電極部が互いに触れないようにすること。[十分な治療効果が得られないおそれがある]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) パッケージは除細動電極を使用する直前まで開封しないこと。
- (2) 使用中は直接電極部に触れないこと。[操作者が火傷または電撃を受けるおそれがある]
- (3) 屋外で使用する場合、患者を湿気のある大地から絶縁すること。[操作者及び周囲の人が火傷を負ったり電撃を受けるおそれがある]
- (4) 本品の貼付により、皮膚に対して弱い感受性を示すことがある。本品の電解ゲルにはアラビアゴムが含まれ、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

保管温度：長期保管 0～35℃、短期保管 -30～65℃

- * ※ リキッドジェルタイプは平坦な場所に横たえて保管すること。

＜有効期間＞

ZOLL Pedi-padz 小児用除細動電極：
製造より 24 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
ZOLL Pedi-padz ラジオールセント小児用除細動電極：
製造より 12 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
ZOLL Pedi-padz 小児用除細動電極（リキッドジェル）：
製造より 12 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

旭化成ゾールメディカル株式会社
電話番号：03-6205-4920（代）

** ＜外国製造業者＞

ゾールメディカルコーポレーション（ポータケット）（米国）
ZOLL Medical Corporation(Pawtucket), USA

取扱説明書を必ずご参照ください。