

アキュポ

【警告】

使用方法

- ・採血部位を必ず消毒すること。採血後は絆創膏などで必ず止血と保護を行うこと。[感染の危険性があるため]
- ・採血を行った後の穿刺針には血液が付着しているため、他人に触れないように廃棄すること。[病原微生物の感染を防ぐため]

【禁忌・禁止】

適用対象（使用方法）

- ・穿刺針は再使用しないこと。[病原微生物の感染を防ぐため]

【形状・構造及び原理等】

1. 本体（寸法 129mm / 直径 10mm / 質量 16g）



2. 体に接触する部位の原材料

名称	原材料
先端キャップ	ステンレス

3. 原理

本体にランセットを装着した後、穿刺ボタンを押すことで先端キャップの穿孔から穿刺する。

【使用目的又は効果】

血糖自己測定などの微量採血を目的とするブラッドランセットを装着するために用いる。本品は再使用可能であるが、ランセットは再使用不可である。

【使用方法等】

- ① 先端キャップを回して外し、ランセットを装着する。
- ② 先端キャップを本体に取り付ける。
- ③ 採血部位を消毒する。
- ④ 採血部位に先端キャップを当て、穿刺ボタンを押し、穿刺する。
- ⑤ 採血および血糖値の測定などを行う。
- ⑥ 絆創膏などで採血部位の止血と保護を行う。
- ⑦ 使用済みランセットを本体から取り外し、廃棄する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・10℃～40℃の環境で使用すること。[手元がぶれてけがなどをする恐れがあるため]
- ・本品に破損などの異常が見られた場合、使用を中止すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

適用対象（患者）

- ・脱水症状、ショック状態、末梢循環障害のような抹消血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示す恐れがあることに注意すること。

使用方法

- ・指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。[アルコール消毒のみでは果物などの食品に触れた際の糖分の除去が不十分との報告があり、血糖値が偽高値となる恐れがあるため]
- ・先端キャップを外すときは、針先が指に触れないように注意すること。
- ・使用前にランセットをつけて動作確認を行うこと。
- ・耳朶等、組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染の恐れがあるため]
- ・本品は消毒液への浸漬や噴霧、高温殺菌をしないこと。[故障の原因となるため]

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間 3年 [自己認証(当社データ)による]

保管方法 周囲温度-5～50℃、相対湿度20～80%とする。

【取扱い上の注意】

本品を使用後は必ず清潔にして保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・本品の修理や改造をしないこと。事故の原因となります。
- ・本品およびランセットは小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本品は消耗品のため、破損の場合は破棄すること。
- ・不具合が見られた場合は使用せず販売店へご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：アイソン株式会社

〒332-0032 埼玉県川口市中青木3-12-21

TEL：048-299-3597

製造国名：大韓民国

製造業者名：LEADONE MEDICAL

販売業者（問い合わせ先）：クリア・ポート株式会社

〒270-0143 千葉県流山市向小金3-89-306

TEL：04-7115-9040

取扱説明書を必ずご参照ください