

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般的名称：吸引チューブ (16779000)

販売名：吸引チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
（本品はデイスポーザブル製品であり再使用による機能低下、並びに感染のおそれがある。）
- ・本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

柔軟性のあるチューブより構成されている

形状：

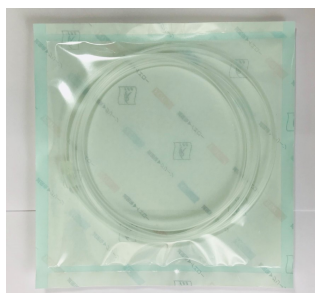

材料：
ポリエチレン

原理：
市販の届出済みニューオムニグラフトのコントロールユニットと処置部のニューグリーンハンドピースに接続し、吸引を行う

【使用目的又は効果】

- （1）本品は、ニューオムニグラフト（届出番号:13B2X10010000007）のコントロールユニットと、ニューグリーンハンドピースとの接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。
- （2）一般名称の定義
吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。

【品目使用等】

- ・包装に破損等のないこと。
- ・本体外観にキズ、汚れ、変形等がないこと

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前に EOG 滅菌して使用する
2. チューブをニューグリーンハンドピース、及びコントロールユニットに接続する。
3. フットスイッチを ON にし、コントロールユニットが作動することにより、不要な皮膚、体液等が回収容器に回収される。

【使用上の注意】

- （1）使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
- （2）包装に破損などが無いことを確認すること。
- （3）使用前に破損、キズ等がないこと。確実に動作するかどうか検査すること。
- （4）使用後は、感染防止に配慮し安全な方法で処分すること。

【貯蔵保管方法及び有効期間等】

水漏れ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

【取扱い上の注意】

折り曲げ、引っ張り等過度の力を加えないこと。（品質不良の原因になる）

【包装】

10 本／袋とする。

【製造販売業者及び造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

製造販売業者：株式会社 I & I
住所：東京都板橋区徳丸 3-24-5
TEL：03-6337-3323