

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般的名称：吸引チューブ（16779000）

販売名：チューブセット（青）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
（本品はディスプレイ製品であり再使用による機能低下、並びに感染のおそれがある。）
- ・本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

柔軟性のあるチューブ及びコネクタより構成されている

形状



材料

チューブ：シリコン

コネクタ：ポリカーボネート、ABS 樹脂、ポリエチレン

原理

市販の届出済みニューオムニグラフトのコントロールユニットと
処置部のニューグリーンハンドピースに接続し、吸引を行う

【使用目的又は効果】

（１）本品は、ニューオムニグラフト（届出番号：13B2X10010000007）
のコントロールユニットと、ニューグリーンハンドピースとの接続
に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

（２）一般名称の定義

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック
製のチューブをいう。

【品目使用等】

- ・包装に破損等のないこと。
- ・本体外観にキズ、汚れ、変形等がないこと

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前に EOG 滅菌して使用する
2. チューブをニューグリーンハンドピース、及びコントロールユニ
ットに接続する。
3. フットスイッチを ON にし、コントロールユニットが作動するこ
とにより、不要な皮膚、体液等が回収容器に回収される。

【使用上の注意】

- （１）使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使
用しないこと。
- （２）包装に破損などがないことを確認すること。
- （３）使用前に破損、キズ等がないこと。確実に動作する
かどうか検査すること。
- （４）使用後は、感染防止に配慮し安全な方法で処分する
こと。

【貯蔵保管方法及び有効期間等】

水漏れ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

【取扱い上の注意】

折り曲げ、引っ張り等過度の力を加えないこと。（品質不良の
原因になる）

【包装】

10 本／袋とする。

【製造販売業者及び造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

製造販売業者：株式会社 I & I

住所：東京都板橋区徳丸 3-24-5

TEL：03-6337-3323