

## ロッドカッターMD

### 【警告】

本品は未滅菌である為、使用前には必ず適切な方法で洗浄及び滅菌を行うこと。

### 【形状・構造及び原理等】



材質：ステンレス鋼（ニッケル・クロムを含む）

### 【使用目的又は効果】

本品は2つの咬み合い部をもつはさみ様の外科用器具であり、ロッド等の切断に用いる。

### 【使用方法等】

1. 使用方法  
ハンドルを持ち上げ、カッター部分にロッドを挟む。  
ハンドルを押し下げロッドを切断する。

### 【使用上の注意】

- 1) 折損、曲り等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 2) 使用後は直ちに点検し、本品に破損、折損等の無い事を確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法  
水濡れ、直射日光、高温、多湿を避けて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前の処理（日常点検及び滅菌）
  - 1) 使用前に、本品が正常機能すること、キズ・変形等により正常機能を阻害する様な形跡がないことを確認する。
  - 2) 磨耗等による形状変化など、本来の機能が発揮されない状態では、交換が必要になるので使用を中止すること。
  - 3) 本品は未滅菌品であるため、使用前に適切な方法で洗浄し、下記に例示する条件又は、医療機関で検証された条件により滅菌を行うこと。

<滅菌方法>

推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌の場合

温度	時間
115～118℃	30分間
121～124℃	15分間
126～129℃	10分間

（日本薬局方—参考情報—微生物殺滅法より）

2. 使用後の処理（洗浄）
  - 1) 本品使用後は、出来るだけ早く洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを確認すること。可動部の汚染物除去は異物が残りやすい為、注意すること。
  - 2) 汚染物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
  - 3) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は本品を腐食させる恐れがあるので、使用しないこと。
  - 4) 洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属性たわし、クレンザー（磨き粉）は本品の表面が損傷するので使用しないこと。

- 5) 超音波洗浄装置等を使用するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、本品の隙間部等に異物などが無いことが確認できるまで洗浄すること。
- 6) 洗浄及び滅菌に使用する水はできるだけ蒸留水、脱イオン水を使用すること。
- 7) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）を使用するときには、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 8) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 9) 可動部の動きをスムーズにするため、水溶性潤滑剤の使用が望ましい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社ACTYPower

\* 電話番号 077-599-5035