

## ツイストソー

### 【警告】

本品は未滅菌である為、使用前には必ず適切な方法で洗浄及び滅菌を行うこと。

### 【禁忌・禁止】

<適用対象>


- 本品に感作又はアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。

<使用方法>

- 洗浄の際は、医療用洗剤以外を使用しないこと。[本品を劣化させる恐れがあるため。]
- ワイヤーを切断して使用しないこと。[撚線が解けるため。]

### 【形状・構造及び原理等】

代表的な外観形状を以下に示す。

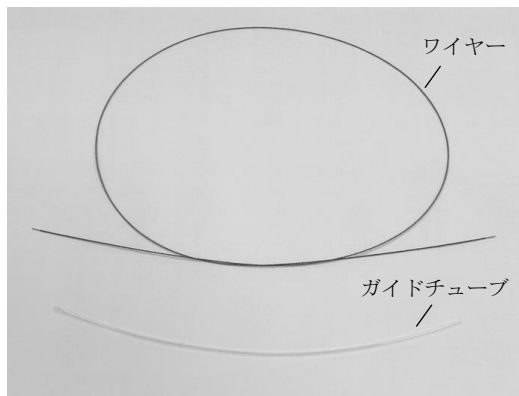

材質：ステンレス鋼（ニッケル・クロムを含む）、  
タングステン、フッ素樹脂

### 【使用目的又は効果】

本品は、骨の切断に使用する。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

本品は、縦割法において骨を切断するために用いる。

- 1) ガイドチューブをテーパ側から切断する部位の脊柱管内へ通す。
- 2) ガイドチューブのフレア側からワイヤーをガイドチューブ内に挿入し、ガイドチューブ内を貫通させる。
- 3) ワイヤーを把持しながら、ガイドチューブを慎重に引き抜く。
- 4) ワイヤーの両端を鉗子等で把持し、ワイヤーを交互に引き切削を行う。

#### 2. 使用法に関連する使用上の方注意

- 1) 本品は未滅菌のため【保守・点検に係る事項】の手順に従い滅菌すること。
- 2) 折損等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 3) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破損片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は摘出等適切な処置を施すこと。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 切断力の低下したワイヤーは使用しないこと。
- 2) 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険

性があり、又、器械の表面を損傷するので、本品とともに電気メスを使用する場合は、十分に注意して使用すること。

- 3) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 4) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

#### 2. 不具合・有害事象

本品の使用により以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。不具合・有害事象が発生した場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) 重大な不具合
  - 本品の変形、折損、及び破損
- 2) 重大な有害事象
  - 不十分な滅菌による感染症
  - 神経、血管及び組織の損傷
  - 骨の亀裂、穿孔、骨折、短縮、壊死
  - 過度な力学的負荷による硬膜損傷（髄液漏）
  - 本品の折損による体内遺残
  - アレルギー反応
- 3) その他の有害事象
  - 痛み・不快・違和感
  - 本品の破損、或いは機能不全による手術時間の延長
  - 本品の破損、或いは誤使用による手術従事者の受傷

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ・保管方法

水濡れ、直射日光、高温、多湿を避けて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用前の処理（日常点検及び滅菌）

- 1) 使用前に、本品が正常機能すること、キズ・変形等により正常機能を阻害する様な形跡がないことを確認する。
- 2) 磨耗等による形状変化など、本来の機能が発揮されない状態では交換が必要になるので使用を中止すること。
- 3) 本品は未滅菌品である。使用前に適切な方法で洗浄すること。洗浄後、付着物がないことを確認し、エチレンオキサイドガス滅菌を行い使用すること。滅菌する際は、使用する滅菌装置の滅菌条件を遵守すること。

#### 2. 使用後の処理（洗浄）

- 1) 本品使用後は、出来るだけ早く洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを確認すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 3) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用しないこと。
- 4) 洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属性たわし、クレンザー（磨き粉）は本品の表面が損傷するので使用しないこと。
- 5) 超音波洗浄装置等を使用するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、器具の隙間部等に異物などが確認できるまで洗浄すること。
- 6) 洗浄及び滅菌に使用する水はできるだけ蒸留水、脱イオン水を使用すること。
- 7) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）を使用するときには、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 8) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

株式会社ACTYPower

電話番号 077-599-5035