

クリアシース

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


- ・再使用禁止 [交差感染のおそれ]

適用対象（患者）

- ・以下の疾患、あるいは状態にある患者には使用しないこと。
 - 意識障害のある患者 [呼吸困難となるおそれ]
 - 呼吸障害（呼吸不全）のある患者 [症状が悪化するおそれ]

* 【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

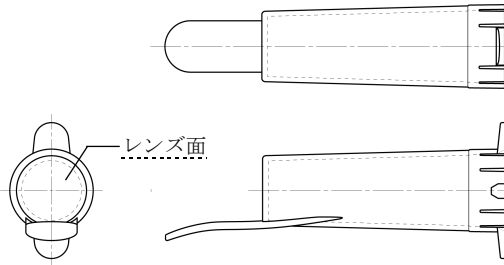

全長：100 mm
挿入(先端)部径：φ21mm

2. 原材料

ポリエチレンテレフタレート
親水性ポリマー（コーティング）

【使用目的】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。
また、内視鏡の挿入部に装着して使用することで内視鏡が粘膜や体液等に直接接触することを防止、保護する。

* 【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を内視鏡先端に装着します。
3. 内視鏡と共に口腔内へ挿入します。
4. 本品の舌圧子部分を用いて患者の舌を適宜移動させ、内視鏡の視野を確保します。

** 【使用上の注意】

* 重要な基本的注意

- ・以下の疾患、あるいは状態にある患者には使用しないこと。
 - 中度以上の歯肉または歯の疾患を有する患者 [悪化するおそれ]
 - 動揺歯がある患者 [歯が抜けるおそれ]
 - 顎顔部、歯、口腔または咽頭部に外傷又は損傷がある、もしくはそれらの部位の手術を受けたばかりの患者 [悪化するおそれ]
 - 嘔吐を繰り返している患者 [嘔吐を誘発するおそれ]
- ・本品をカメラに装着する際、本品が完全に奥まで装着され、外れないことを必ず確認すること [本品の脱落等が発生した場合、患者の口腔内に損傷が生じるおそれ]。
- ・本品の挿入時には絶対に患者の歯に強い力を加えないようにすること。
- ・本品の使用中は常に手で保持し、放さないこと。
- ・患者が本品を咥えている時には、本品を急に動かさないこと。
- ・本品は開封後ただちに使用すること。
- ・本品は当社が指定する医療機器以外の機器と組み合わせて使用しないこと。
- ・本品のレンズ面に触れないこと [塗布されている曇り止めが剥がれ防曇効果が損なわれるおそれ]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。院内での移動保管に関しては本体に衝撃がかからないように取扱いに注意すること。

2. 有効期間

- ** 製造日より3年 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイリス株式会社
電話番号：0120-380-331（アイリスコミュニケーションセンター）

製造業者：伸晃化学株式会社