

2023年4月（第1版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレシブ研削器具(70901000)

ブラスターパウダー

【禁忌・禁止】

- 歯科診療、歯科治療以外には使用しないこと。
- 本品を口腔内で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状
粉末 50 μ



- 主な原材料
酸化アルミニウム等

【使用目的又は効果】

- 物質的性質(代表値)

	白色アルミナ
比重	3.97
融点	~2050℃
ヌーブ硬度	20.4GPa
靱性	57.6%

- 使用目的・用途
歯科技工物製作過程において、サンドブラスト材料として
技工物の表面処理や酸化皮膜の除去に用いる。

【使用方法等】

- 本品を清潔で乾燥したブラスターの粉末容器に充填します。
- 使用の際、術者は保護マスク及び保護メガネを装着すること。
- 本品が床などにこぼれた場合は滑りやすいので大変危険です。
速やかに清掃してください。

【使用上の注意】

- 本品はブラスター専用の研削材料です。
- 本品を使用目的の用途以外には使用しないでください。
- 術者は保護メガネと保護マスクを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

湿度の低い乾燥した場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

Angelus Japan 株式会社

TEL：072-657-7756