


プレジジョン Brilliance 48

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品は湿気のあるところでの保管および使用はしないこと。[部品破損、機器の故障のおそれがあります]
- ・ 直接太陽や、レーザー装置などの高輝度の照明装置を見たりしないこと。
[眼に重傷を負う可能性恐れがあります]

【形状、構造及び原理等】

1. 寸法

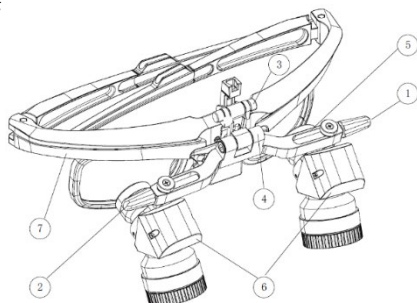

- ①左 PD 調整ノブ、②右 PD 調整ノブ、③メインヒンジ
④セカンドヒンジ、⑤PD バー、⑥ルーペ
⑦メインフレーム

構成品

レンズキャップ、ヘッドストラップ、クリーニングクロス
調節用工具、ドライバー、レンズフレーム、ノーズパッド

フレーム内側：最大幅 142mm、最小幅 131.4 mm

フレーム外側：最大幅 151.8mm

顕微鏡部：最大幅 112.3mm

接眼レンズ部：φ 15mm×15mm

対物レンズ部：φ 20mm×20mm

質 量：94.3g

2. 原理

眼鏡レンズ部に装着したルーペの対物レンズにより光を集め、接眼レンズを通して作業野を拡大する。

また、対物光軸と接眼光軸の角度を固定ディローイング 48° とし
て設計しているため、まっすぐに直立して座り、首を曲げること
なく治療したいものを確認できる。

3. 仕様

倍率	作業距離	作業距離 / 視野
5.4x	350mm - 400mm	350mm / 49mm ± 5%
		400mm / 57mm ± 5%
5.3x	400mm - 450mm	400mm / 57mm ± 5%
		450mm / 65mm ± 5%
5.2x	450mm - 500mm	450mm / 65mm ± 5%
		500mm / 73mm ± 5%
5.1x	500mm - 550mm	500mm / 73mm ± 5%
		550mm / 81mm ± 5%

【使用目的又は効果】

本品は、フレームとレンズから成るシステムであり、外科処置時
に術者が装着することで小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大
像が得られる。

【使用方法等】

1. 装着前に各ヒンジ及び各固定ねじに緩みがないことを確認し
ます。
装着感を確認し、ヘッドストラップを軽く締めます。
2. ルーペを通して、対象物を観察し、左右の調整ノブで調節し
ます。
3. ルーペを目の高さに合わせます。
4. メインヒンジ、セカンドヒンジでルーペの角度を調整します。
5. レンズの視度調節リングを回し対象物の焦点を合わせます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 使用前に必ず各部品にガタ、緩み、可動部の異常、レンズの
キズ、汚れ等がないことを確認すること。
- 使用前にレンズを埋め込んでいる部位にキズ、ヒビ、接着部
等に異常がないことを目視にて確認すること。
- 装着後、視野の円が一つになっていることを確認した上で使
用すること。
- 使用中及び着脱時にレンズ部を触らないこと。着脱時は両手
でフレームを持つこと。
- 眼球等を傷つけないように注意して装着すること。
- レンズを傷つけないように注意して取り扱うこと。
- 使用中に何らかの異常を感じた場合には直ちに使用を中止す
ること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 使用前に本添付文書及び取扱説明書を必ず読み十分に理解し
た上で使用すること。
- 拡大鏡や光学機器等を、ルーペライトの前に置かないこと。
- 本品を使用して歩行や運動をしないこと。
- 事前に本品を使用した立体視に慣れた上で使用すること。
- ルーペ部分を外して左右を入れ替えないこと。外した場合は、
左右のルーペを間違えないよう取り付けること。

【保管方法及び有効期間等】

<耐用期間>

正規の保守点検を行った場合に限り、4 年間

<保管条件>

- 温度：-20℃～50℃
- 相対湿度（結露不可）：20%～80%
- 気圧：70kPa～106kPa
- 直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその
蒸気の暴露を避けて保管すること。

取扱説明書を必ず参照してください。

【保守・点検に係る事項】

- 本器を流水で洗浄しないこと。
- 滅菌は行わないこと。
- レンズ以外の部分は、水または少量の 75%アルコールで湿らせたクリーニングクロスで清拭すること。
- 95%アルコールに浸した清潔な綿棒またはレンズクリーナーでレンズを拭いて洗浄/消毒し、乾燥させてから保管すること。
- 眼鏡フレームには防曇フィルムが貼られているので、精製水に浸したクリーニングクロスで少し湿るまで拭き取り、やさしく清拭すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

Angelus Japan 株式会社
電話番号：072-657-7756

＜製造業者＞

チャンジャウ シファリ メディカル テクノロジー
Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
(国名：中華人民共和国)