

単回使用：ミキシングチップ

アンジェラス ミキシングチップ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ペースト状の材料を練和するための攪拌部及びミキシング部と専用カートリッジに取り付けるためのキャップ部からなる。



2. 寸法

種類	形状	寸法	
Brown 40mm Taper type		全長	40
		ミキシング部	30
		チップ幅	1.6
		キャップ外寸	13.6
		キャップ内寸	10.3
Brown 50mm Taper type		全長	50
		ミキシング部	40
		チップ幅	1.6
		キャップ外寸	13.6
		キャップ内寸	10.3
Brown 36mm Wide type		全長	36
		ミキシング部	26.3
		チップ幅	4
		キャップ外寸	13.6
		キャップ内寸	10.3
XS-white Intra oral tip		全長	13
		ミキシング部	7.5
		チップ幅	1.8
		キャップ外寸	1.8
		キャップ内寸	1.5
XXS-white Intra oral tip		全長	15.5
		ミキシング部	9.5
		チップ幅	1
		キャップ外寸	1.85
		キャップ内寸	1.5

3. 材質

Taper type、Wide type

ミキシング部：ポリプロピレン樹脂

攪拌部：POM 樹脂

キャップ部：ポリプロピレン樹脂

Intra oral

ポリエチレン

4. 原理

カートリッジから押し出されたペースト状の歯科材料がミキシングチップ内にある攪拌部によって練和される。

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料を練和する器具であり、練和並びに注入に用いる。

【使用方法等】

- 新しいミキシングチップを取り付ける前に、シリンジ容器のプランジャーを押して、2 種のペーストが均等に押し出されることを確認し、シリンジの開口部をふき取る。
- ミキシングチップの突起部をシリンジ容器の切りこみに合わせ取り付け、時計方向（右）に 90 度回転し確実に固定する。
- プランジャーを押して、均質な色調のペーストがチップから出るまで押し、出されたペーストは廃棄する。
- 必要の場合は、Wide タイプのチップ先端に Intra oral タイプを取り付ける。
- 使用後は直ちにシリンジからミキシングチップを取り外し、確実にシリンジキャップを装着する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 無理な力や角度で装着、脱着を行わないこと
- ペーストを押し出す時に、抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずに、ミキシングチップの交換等を行うこと。
- あらかじめ口腔外で接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。また使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
- セメントの練和（硬化）時間より前に、本品での操作を終了すること。
- 使用後は、速やかにシリンジから本品を外すこと。

【使用上の注意】

- 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- 本器を使用する際は、割れ、ヒビ、曲がり、キズ、汚れ等があるものは使用しないこと。
- 本品は、1 回の混和操作毎に使用し、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温多湿を避けて保管すること。
- 外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

Angelus Japan 株式会社

電話番号：072-657-7756

<製造業者>

Peng Waves Enterprise Co., Ltd.

ペンウェーブエンタープライズ

（国名：台湾）