

プレジジョン Condenser


【禁忌・禁止】

- ・ 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
- ・ 使用目的に応じて使用すること。
- ・ 患者ごとに滅菌して使用すること。
- ・ 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
- ・ 器具の形態変更や改造などはしないこと。
- ・ 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

ニッケルチタン合金製の作業部（A）とステンレススチール製の作業部（B）がハンドル部の両側についている。本品は、単品あるいは組み合わされて販売される。

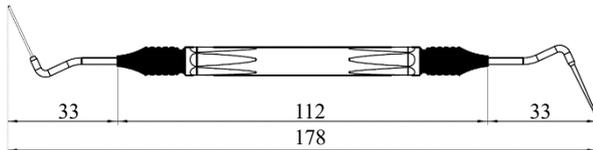

質量：26.84g

原材料

ハンドル部：アルミニウム

作業部：ニッケルチタン合金 / ステンレススチール

2.仕様

種類	作業部（A）	作業部（B）	色別
	先端直径		
N35/S70	0.35mm	0.70mm	グリーン
N40/S80	0.40mm	0.80mm	グレー
N50/S100	0.50mm	1.00mm	イエロー
N60/S120	0.60mm	1.20mm	ブルー

【使用目的又は効果】

先細の作業部分を持ち、根管内に充填物を主に軸方向に充填または圧接するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に滅菌する。
2. 先端や可動部をよく確認し、器具が正常に使用できるようにする。
3. 使用部位や大きさなど用途に合うものを選択する。
4. 作業部で、充填物を軸方向に押さえるようにして充填する。
5. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌を行う。
 - ① 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - ② 洗浄液から取り出して水洗し、超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液（アルコール）に浸漬します。
 - ③ 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りします。
 - ④ オートクレーブ滅菌します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。破折の原因となる。
- 作業部を火焰等であぶらないこと。作業部の弾性等の性質が失われる場合がある。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。
- 酸性およびアルカリ性洗浄剤・消毒剤による洗浄・消毒をしないこと
- 改造しないこと

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品に使用された材料により感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 本品に劣化や異常が発見された場合は、速やかに使用を中止する等、適切な措置をとること。
- 本品は、患者の手に触れないようにすること。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水分、腐食性薬材や蒸気等の暴露を避け、物理的負荷及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後は破損、ヒビ、大きなキズや腐食がないことを確認すること。これらがあつた場合は、破棄すること。
- 滅菌前に超音波洗浄を行うこと。
- 洗浄した後水気を完全に除去すること。
- 初回使用前と毎診療後に、必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。
- 滅菌条件は下記のとおりとする。
121°C、30分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

Angelus Japan 株式会社
電話番号：072-657-7756

〔製造業者〕

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd.
チェンドウ サニー メディカル イクイップメント
（国名：中華人民共和国）