

機械器具 36 医療用ピンセット
 一般医療機器 ピンセット (JMDNコード:35079001)
 アメディフ 口腔ケアキット

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ケアスティック：ステンレス
 スポンジ：ポリビニルホルマール

2. 形状又は構造


本品の代表的な製品の外観・形状は下記のとおりである。

ケアスティック



全長約 19cm

スポンジ (付属品)

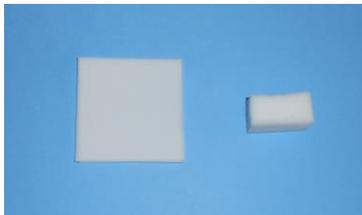

シート型：約 6cm x6cm

ブロック型：約 1.5cm x1.5cm x2.5cm

約 1.5cm x1.5cm x3.5cm

【使用目的又は効果】

保持したスポンジにより、口腔内や口腔周りの洗浄や汚物のふき取り、薬液の塗布等に使用する。ハンドルは永久的に結合している。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) ケアスティックを使用する場合
 - ① スポンジを水に浸して柔らかくし、軽く絞って使用する。(水道水でも可)
 - ② 柔らかくなったスポンジの中心付近をケアスティックの先端部分で挟む。
 - ③ ケアスティックのリングをスライドさせてスポンジを固定する。(ただし、このリング固定だけでは不十分なので、しっかりスティックを握りしめて使用する事。)
 - ④ 口腔内や口腔周りの洗浄や汚物のふき取り、薬剤の塗布等に使用する。
 - ⑤ 使用したスポンジはケアスティックより外して廃棄する。(再使用しない。)
 - ⑥ ケアスティックは、洗浄、すすぎ等を行った後、乾燥させて保管する。
- 2) スポンジだけで使用する場合
 - ① スポンジを水に浸して柔らかくし、軽く絞って使用する。(水道水でも可)
 - ② スポンジは指に巻き付けたり、指で挟んで使用する。
 - ③ 口腔内や口腔周りの洗浄や汚物のふき取り、薬剤の塗布等に使用する。
 - ④ 使用したスポンジは廃棄する。(再使用しない。)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的事項
 - 1) 本品は未滅菌品である。
 - 2) ケアスティックは、破損、曲がり等の原因になる可能性があるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - 3) 使用時は、ケアスティックをしっかりと握りしめて、先端に挟んでいるスポンジが外れないよう注意する。
 - 4) スポンジだけで使用する場合は、口腔内に脱落等の無い様に注意する。
 - 5) 使用後は、スポンジは廃棄し、ケアスティックは十分洗浄し乾燥させて保管する。
2. 不具合・有害事象
 - 1) スポンジがちぎれて口腔内に残る。
 - 2) スポンジを噛みちぎる。
 - 3) ちぎれたスポンジを誤飲する。
 - 4) 過負荷によるケアスティックの屈曲、破断、疲労破損。

これらの不具合及び有害事象のため治療や処置が必要な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件
 - 1) ケアスティックを保管する場合、洗浄した後、必ず乾燥させること(濡れたままで保管すると、サビ、変色の原因となる。)
 - 2) ケアスティック及びスポンジは、直射日光を避け常温・常湿で保管すること。
 - 3) 一度水に浸したスポンジは保管せず、必ず廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：アイオン株式会社 関東工場
 お問い合わせ窓口：メディカル開発推進室
 電話番号：0280-92-0725