

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ（JMDNコード：13705000）
アメディフ アブソービングブロック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. X線造影ボールチェーン部分を直接掴んで使用しないこと。【破断または抜け落ちて体内に遺残する恐れがある】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：アイオン株式会社 関東工場
お問い合わせ窓口：メディカル開発推進室
電話番号：0280-92-0725

【形状・構造及び原理等】

ポリビニルホルマールスポンジを電子線滅菌した製品です。
X線で検知できるボールチェーン（ステンレス）を取り付けています。

スポンジ：ポリビニルホルマール
X線造影チェーン：ステンレス



Sサイズ 40mm x 25mm x 3mm
Mサイズ 50mm x 30mm x 3mm
Lサイズ 65mm x 35mm x 3mm
膨潤時の厚さ 約10mm

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥または汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷または内部構造に適用することを目的とする。X線で検知可能な成分を含有する器具を言う。

【使用方法等】

本品は、鉗子などで把持するか直接手に持って、術野や創傷部に当てて体液や洗浄液の吸収、患部の圧迫や保護に使用する。

【使用上の注意】

- ・吸液によりスポンジは膨張する。
- ・使用後は、体内に留置しない。
- ・再滅菌して使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光、水漏れを避けて保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯の付近やオゾン発生器の側に保管しないで下さい。
- ・開封後は、速やかに使用して下さい。
- ・本品はスポンジである為、長期間の保存により黄色く変色したり、復元する（膨らむ）場合があります。しかしながら、品質には問題ありません。
- ・有効期間は、包装容器に記載されています。