

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード 70976000
*（歯科用手袋 JMDN コード 70911000）

アンセル合成ゴム製検査・検診用手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

合成ゴムを主材料とし、副材料に滑剤を含まないパウダーフリー、未滅菌、単回使用の検査・検診用手袋である。

形状：平手タイプ（左右兼用）

表面仕上げ：粗面（指先部）

* 【使用目的又は効果】

手術を除いた医科及び歯科の検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

- ・製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）の症状を起こすことがある。また体質によっては、かゆみ、発赤、蕁麻疹、ショック等の症状が現れることがある。このような症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。

＜重要な基本的注意＞

- ・同一患者のみに使用すること
- ・開封する前に本品の包装を点検すること。包装に破損等の異常がある場合、その製品は使用しないこと。
- ・ピンホール等の異常が認められる場合には使用しないこと。

＜相互作用＞

- ・薬品、溶剤等によっては、膨張したり、浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・使用期限は本品の包装に記載［自己認証（当社データ）による］。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン

東京都港区六本木三丁目 4 番 3 1 号

Tel：03-5549-8151