

器 06 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器フィルタ 14352000

疎水フィルタ

再使用・再滅菌禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・本製品のハウジングには、流入側表記 (IN) がされている。この流入表記 (IN) を逆側に装着しないこと。
- ・本製品をすすぎ、消毒、滅菌しないこと。
- ・本製品を吸引装置や液体に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、ガス供給ラインに設置するフィルタであり、膜の孔径や膜の帯電により、殺菌性病原体を補足するものである。

〈形状〉



〈材質〉

- ・ハウジング：ポリプロピレン
- ・フィルタメンブレン：ホウケイ酸ガラス

〈構成〉

構成	仕様
ハウジング	接続部径 3-6mm (両端)
フィルタメンブレン	HEPA 性能 : 99.97% 以上 (粒子径 0.3 μ m) 細菌捕集率 : 99.99% 以上 (BFE) ウイルス捕集率 : 99.99% 以上 (VFE)

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、人工呼吸器のガスラインへの粒子及び微生物の侵入を防止するために用いるフィルタである。

【使用方法等】

1. フィルタの向き (流入側表記 : IN) を確認し、人工呼吸器ライン (吸気側) に接続すること。※
2. フィルタが詰まっている、又は接続が固い場合は、フィルタを交換すること。※

【使用上の注意】

1. 本製品による流量抵抗の増加が確認された場合や、流量抵抗の増加の原因が、本製品によるものと疑われる場合は、直ちに本製品を交換すること。※
2. 本製品使用後は、廃棄物処理法に基づき適正に処理すること。

【保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

- ・水濡れ、直射日光、高温多湿な場所は避けて、5℃～40℃の温度で、清潔で乾燥した場所で保管すること。

〈使用期間〉

- ・本製品は単回使用の製品である。
- ・個包装に記載の使用期限を参照のこと。
(適正な保管方法が保たれていた場合)
- ・保管には十分注意し、使用期限を経過した製品は使用しないこと。

【包装】

10 個 / 包装 ※

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉 ※※

株式会社 RSL
TEL 06-6809-3220

〈製造所〉 ※※

HUM 社 (HUM GmbH)
製造国 : ドイツ