

機械器具06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット 70566000
PAC ワンペーシエント呼吸回路

【警告】

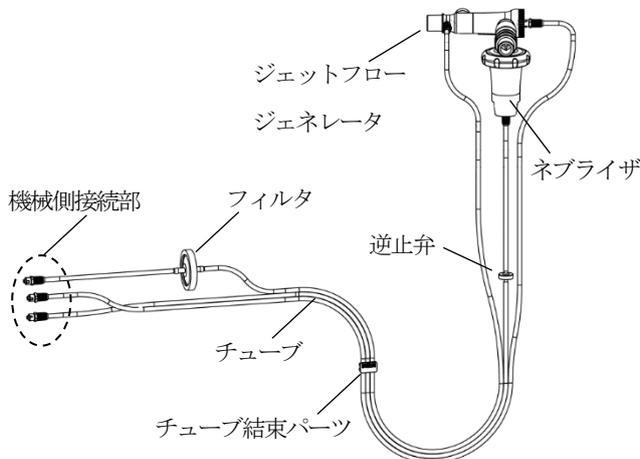
1. 本品は、必ず「高頻度人工呼吸器 PAC-35」のみに使用し、他の人工呼吸器とは使用しないこと。
2. 本製品は同一患者に使用し、複数の患者には使用しないこと。
[相互感染を引き起こす恐れがある]
3. 患者に装着する前に回路が正しく組み立てられていること、ネブライザのカップキャップが確実にしめられていることを確認すること。[リーク等により患者換気が正常におこなわれないことがある]
4. 治療の開始前にネブライザが正常に作動しているかを確認すること[正常に作動していない場合は、気道の乾燥により炎症発生の可能性がある]

【禁忌・禁止】

1. 各コネクタは人工呼吸器本体の同色の接続コネクタに接続すること[誤接続は故障の原因となる]。
2. チューブの劣化によりリークが発生した場合は使用を中止すること[治療ができなくなる]

【形状・構造及び原理等】**概要**

本品は人工呼吸器「高頻度人工呼吸器 PAC-35」（承認番号：30300BZX00316000）に接続し呼吸回路として用いるもので、ジェットフロージェネレータ、ネブライザ、チューブ部から構成される。

形状

接続端の色分け：誤接続を防止するため接続端は下記の通りに色・形状分けされている。

チューブの種類	圧力検出ポート用	ピストンポート用	ネブライザポート用
ジョイントラッチ			
色	ピンク	グリーン	ブルー
形状	2山	3山	4山

【使用目的、効能又は効果】

人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

操作方法の詳細については、人工呼吸器「高頻度人工呼吸器 PAC-35」（承認番号：30300BZX00316000）の取扱説明書を参照すること。以下に基本的な使用方法を示す。

組立方法

1. 使用直前に包装を開封する。
2. 必要に応じて消毒する。
3. 構成部品を目視で点検し、ひび割れや破損がないことを確認する。異常を発見した場合は使用しないこと。
4. 各接続部位がしっかりと接続されていることを確認する。
5. チューブの接続コネクタを人工呼吸器に接続する。
6. 必要に応じてディスプレイのマウスピース、呼吸ノズル、呼吸マスク(いずれも本品外)を接続する。

使用前

1. 人工呼吸器の取扱説明書を参照し、点検・動作確認を行い、異常がないことを確認する。

使用后

1. 人工呼吸器から本品を取り外す。
2. 感染防止に配慮しながら以下の手順にて消毒を行う。治療ごとに1度の消毒を推奨する。なお、廃棄する場合は医療廃棄物として適切に廃棄すること。
 - 回路本体
次亜塩素酸ナトリウム(100ppm)に1時間浸漬消毒し、消毒後は滅菌精製水で十分に濯ぎ洗いをする。
 - チューブ、チューブ接続コネクタ、チューブ結束パーツ、フィルタ、逆止弁
外装面を消毒用エタノールで清拭する。
 - ピストンロッド用スプリング
消毒用エタノールで清拭する。
3. 自然乾燥させ、清潔な場所にて保管する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・ 移送等、非稼働時は本品を装置本体から取り外して移送・保管をおこなうこと。
- ・ チューブの接続部に誇りやゴミがついた状態で使用しないこと。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

- ・ リークや閉塞が認められた場合は速やかに新品に交換すること
- ・ 本品使用中は機器及び患者に異常のないことを常時監視すること。異常が認められた場合はすぐに使用を中止するなど適切な処置を講じること。
- ・ 本品使用中はシーツやタオルなどで覆わないこと。
- ・ 改造・分解等をおこなわないこと。

【保管方法及び有効期間等】**〈保管方法及び有効期間〉**

- ・ 常温、常圧下で保管すること。
- ・ 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて清潔に保管すること。
- ・ 有効期間は3年[自己認証による]

〈使用期間〉

使用期間は開封から6か月間である。

PAC-35 本体の取扱説明書を必ずご参照ください。

【包装】

5セット／包装。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 RSL

連絡先：06-6809-3220

[製造業者]

株式会社 IBS

PAC-35 本体の取扱説明書を必ずご参照ください。