

DAIYA ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

形状：左右兼用タイプ

サイズ：XS / S / M / L / XL

材質 ニトリルゴム 100%、パウダーフリー

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為 及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

重要な基本的注意

- 1) 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認して使用すること。
 - 2) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
 - 3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
 - 4) 複数の患者には使用しないこと。
 - 5) 使用者に適したサイズの製品を使用すること。
- 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アマノ

東京都中央区日本橋1丁目14-7 明治安田生命江戸橋ビル2F

製造業者 株式会社アマノ

発売元 株式会社アマノ

商品に関するお問い合わせ先 03-6739-3093