

器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (16779000)
バキューエイド 吸引チューブ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1) 吸引チューブを洗浄しないで別の患者に使用しないこと。また、患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。[感染するおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞



＜原理＞

電動式可搬型吸引器で陰圧を発生させ、吸引ボトルの蓋に接続した吸引チューブによって、患者の吸引物を吸引ボトルへ移送する。

【使用目的又は効果】

本品は吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

[使用準備]

- 1) 本品にひび割れ等がないか確認する。
- 2) 吸引チューブを、吸引ボトルの吸引チューブ接続部に差し込む。

[使用]

- 1) 吸引器本体の取扱説明書に従い操作する。
- 2) 必要に応じて吸引カテーテル（別売品）を吸引チューブに接続して吸引を開始する。

[使用後]

- 1) 吸引チューブを蓋から外す。
- 2) 保守・点検に係わる事項のとおり、洗浄する。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は下記医療機器と併用して使用します。

販売名：バキューエイドQSU

認証番号：225AFBZX00105000

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品は一人の患者専用とし、使用頻度に応じ適切に交換すること。

＜相互作用＞

【併用注意】

- 1) 吸引カテーテル等の中には、本品に接続できないものがある。使用前に、接続する吸引カテーテルと本品が確実に接続できることを確認すること。
- 2) 吸引カテーテルの使用法等は吸引カテーテルの取扱説明書に従うこと。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守・点検事項＞

- 1) 本品は使い終わるたびに、機器から外し、チューブ内を温かい流水で十分に洗い流す。
- 2) 食酢1に対して温水3の割合の混合液で洗い流し、温かい流水ですすぐ。
- 3) 十分に乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社

製造業者：DeVilbiss Healthcare（米国）

吸引器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。