

## 器 06 呼吸補助器

高度管理医療機器 新生児・小児用人工呼吸器 (14361000)

新生児・小児用人工呼吸器 Millennium (ミレニアム) のオプション  
スマートシンク

再使用禁止


## 【禁忌・禁止】

&lt;使用方法&gt;

- 1) 再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

&lt;形状&gt;

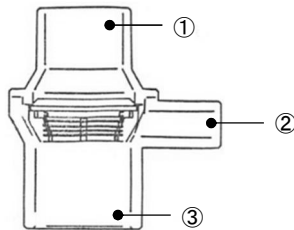

- ① 呼吸回路 (Y ピース) 接続口  
② 気道内圧測定チューブ接続口  
③ 患者側接続口


## 【使用目的又は効果】

自分では十分な呼吸が出来ない患者を対象として、器械的に人工換気を行わせるために使用する新生児・小児用人工呼吸器 Millennium (ミレニアム) のオプション品である。小児及び新生児 (未熟児を含む) に対して使用される。


## 【使用方法等】

[使用準備]

- 1) スプリングが適切な位置にあることを確認する。  
2) フラッパーがバルブシートの同軸上にあることを確認する。

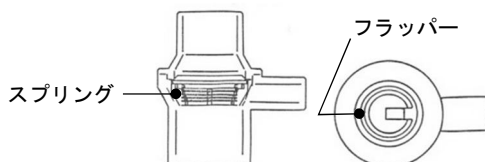

- 3) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、患者回路と本品を接続する。

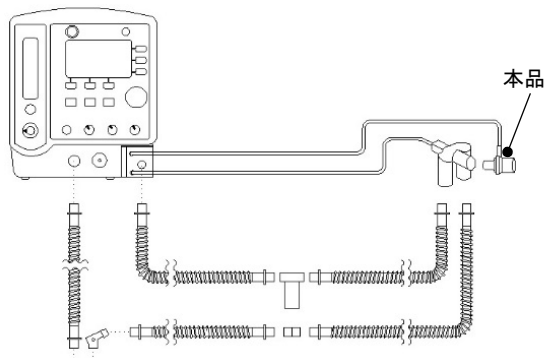

接続図

- 4) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、使用前の点検を行う。

[使用中]

- 1) 人工呼吸器本体の使用方法に従う。

[使用后]

- 1) 患者回路から取り外し、廃棄する。

## 【使用上の注意】

&lt;重要な基本的注意&gt;

- 1) 滅菌しないこと。  
2) 気道内圧測定チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置すること。  
3) 人工呼吸器本体のトリガー感度を設定する際には、必ず本品を接続すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : エア・ウォーター・メディカル株式会社  
製造業者 : Sechrist Industries Inc. (米国)

呼吸器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。