

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

## 排液チューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 本品を吸引器と回収容器以外での組合せにて使用しないこと。[本品が正しく機能しないおそれがあるため。]
- 再使用禁止

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【形状・構造及び原理等】

<本品の代表図>



- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
- ・エチレンオキサイドガス滅菌済み
- ・本品は、術中の体液等を排出させる際に用いるチューブである。

#### 【使用目的又は効果】

- ・本品は吸引器と回収容器との接続に用いるチューブで、ディスプレイ製品である。

#### 【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装から本品を取り出す。
2. 本品を吸引器や回収容器にゆるみや外れが生じないようにしっかりと接続する。

#### 【使用方法に関する使用上の注意】

- ・あらかじめ接続部にゆるみがないことを確認すること。
- ・チューブが閉塞しないように過度に折り曲げたり踏みつけたりしないこと。

#### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出するおそれがあるので、注意すること。
- ・包装を開封したらすぐに使用すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社  
電話番号 0283-22-2801

[製造元]

フォルテグロウメディカル株式会社  
フォルテグロウメディカル ベトナム  
(FORTE GROW MEDICAL VIETNAM CO., LTD.) ベトナム