

** 2017 年 7 月 改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号 : 09B1X00004000118

* 2008 年 3 月 改訂（第 2 版）

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000

メジシース®

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

薬液が充填された注射筒（プレフィルドシリンジ）に装着する際、栓に針で穴をあけ投与可能とするためのアダプター。

<本品の代表図>

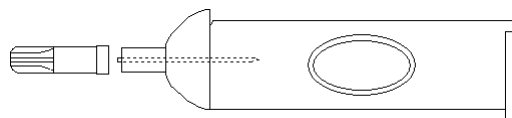

<材質>

針管	ステンレス SUS304
本体	ポリプロピレン
保護栓	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

- 本品は薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる用具をいう。容器に接続、挿入するための、チューブ、あるいはスパイクを備えるものもある。
- 本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意した上で包装内から取り出す。
2. 薬液の充填された注射筒（プレフィルドシリンジ）に、しっかり装着する。この操作で、アダプター内部の貫通針により注射筒の栓に穴がけられる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 本品の針部には、直接手を触れないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。

- * 2. 有効期間・使用期限
包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801