

\* 2017 年 7 月 改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）  
2014 年 5 月 作成（第 1 版）

医療機器届出番号 : 09B1X00004000142

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

## オートスピロス

### 再使用禁止

#### 【警告】

- 本品の接続部は、使用前及び使用中にかかわらず、緩みがないことを常に確認すること。[嵌合が緩み、液漏れを起こす可能性がある。]
- 混注操作を行う場合は、操作前に混注口を消毒薬等で消毒すること。[感染の可能性がある。]

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

- 本品はポリカーボネートを使用しているため油性の薬剤、アルコールを含む薬剤、脂肪乳剤などを使用する場合は注意すること。[破損する可能性がある。]
- プライミングキャップをはずす際は、真っ直ぐ取り外すこと。[薬液漏れの可能性がある。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】


水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

##### 【使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【形状・構造及び原理等】

＜本品の基本構成＞

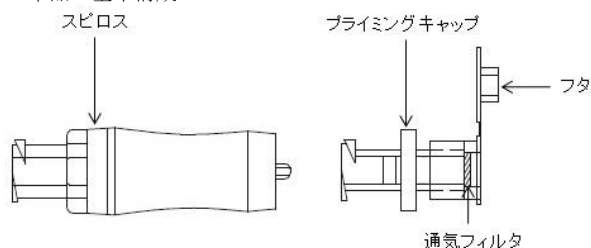

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社  
電話番号 0283-22-2801

- 本品のプライミングキャップはプライミング後に取り外すものである。本品は上記の部品が嵌合した状態で供給される。
- 本品は天然ゴムラテックスを含有していない。
- 本品は DEHP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を含有していない。

#### 【使用目的又は効果】

本品は輸液ラインや延長チューブ等アダプタとして接続、或いは混注部に接続するアダプタである。

#### 【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装を開封します。
2. 本品のメスルアー部を輸液セット等のオスルアー部に接続します。
3. 本品のプライミングキャップのフタが開放されていることを確認します。
4. 輸液セットの流量調節器を閉じて薬液容器の所定の位置にピン針を垂直に刺し薬液容器をガートルスタンド等のハンガーに掛けます。
5. 点滴筒を傾け適量が入った時点で静かに戻す等の方法で、点滴筒の半分程度まで薬液を溜めます。
6. 流量調節器を緩めて本品に薬液を満たします。
7. 本品内のエアが完全に抜け、薬液が充填されたことを確認し、流量調節器を閉じます。
8. 本品のプライミングキャップのフタを完全に閉じます。
9. 本品を固定しプライミングキャップをひねりプライミングキャップを取り外します。
10. 本品のオスルアー部を他の輸液ラインのメスルアー部に取り付けて輸液を開始します。
11. 使用後は輸液ラインのメスルアー部から回転させ接続を外します。