

* 2022年3月 改訂 (第2版)
2016年3月 作成 (第1版)

医療機器届出番号 : 09B1X00004000149

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

マルチチャンネル用コネクタ

再使用禁止

【警告】


1. 接続部は外れないように確実に取り付けること。
2. 本品を指定した製品以外に取りつけないこと。[指定外の製品を接続すると使用中の外れやリークの原因となる。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品をアルコール等の有機溶剤と接触させないこと。[アルコール含有消毒剤及び脱脂目的によるアセトン等の有機溶剤に接触すると強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

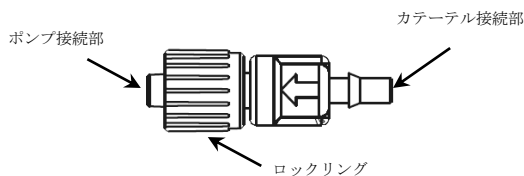

- ・別売りのマルチチャンネル ドレナージ カテーテルS (認証番号: 227AABZX00089000) とマルチチャンネル ドレナージ ポンプ (届出番号: 09B1X00004000147) を接続する専用コネクタである。

マルチチャンネル用コネクタ

カタログ番号	サイズ	コネクタカラー	適応カテーテルカタログ番号
5240-35	3.5mm 用	ピンク	5221-35S
5240-50	5.0mm 用	ブルー	5221-50S 5221-50SNL 5221-07SF 5221-07SFNL 5221-10SF 5221-10SFNL
5240-65	6.5mm 用	クリア	5221-65S 5221-65SNL
5240-80	8.0mm 用	グリーン	5221-80S

- ・本品は、マルチチャンネル ドレナージ ポンプ全カタログ番号に接続可能である。

【使用目的又は効果】

本品は、排液用のカテーテルをポンプなどの別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

1. 接続するマルチチャンネル ドレナージ カテーテルSのサイズを確認する。
2. マルチチャンネル ドレナージ カテーテルSに適応するサイズのマルチチャンネル用コネクタを選択して、汚染に注意し滅菌袋から取り出す。
3. マルチチャンネル用コネクタのカテーテル接続部をマルチチャンネル ドレナージ カテーテルSのカテーテル端にしっかりと突き当たるまで挿入する。
4. ポンプ接続部にマルチチャンネル ドレナージ ポンプのYコネクタをしっかりと奥まで挿入してロックリングを確実に締め付ける。
5. マルチチャンネル ドレナージ カテーテルS、マルチチャンネル用コネクタ、マルチチャンネル ドレナージ ポンプの各接続状況を確認後、吸引を開始する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【使用期限】

- ・包装 (ラベル) に使用期限を表示している。[自己認証による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

*【販売元】

カーディナルヘルス株式会社
電話番号 0120-917-205