

** 2022 年 3 月 改訂 (第 5 版)

医療機器届出番号 : 09B1X00004000150

* 2020 年 5 月 改訂 (第 4 版)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

マルチチャネル用コネクタロング

再使用禁止

【警告】

1. 接続部(両端コネクタ)は外れないように確実に取り付けること。
2. 本品を指定した製品以外に取り付けけないこと。[指定外の製品を接続すると使用中の外れやリークの原因となる。]

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 吸引時は過度な陰圧をかけないこと。[チューブが閉塞するおそれがある。]

*【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>



* Yタイプ/Iタイプ

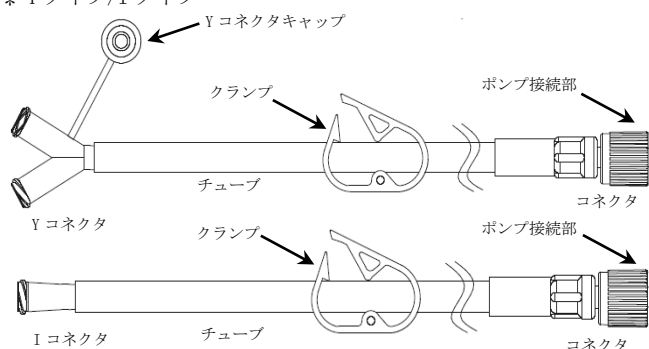

- ・別売りのマルチチャネル ドレナージ カテーテル S(認証番号: 227AABZX00089000)のカテーテルとマルチチャネル ドレナージ ポンプ(届出番号:09B1X00004000147)を接続する専用吸引チューブである。
- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

マルチチャネル用コネクタロング

カタログ番号	適用サイズ	カテーテル接続部 コネクタカラー	チューブ長
5240-35M	3.5mm 用	ピンク	50cm
5240-35L	3.5mm 用	ピンク	100cm
5240-50M	5.0mm 用 フラット型用	ブルー	50cm
5240-50L	5.0mm 用 フラット型用	ブルー	100cm
5240-65M	6.5mm 用	クリア	50cm
5240-65L	6.5mm 用	クリア	100cm
5240-80M	8.0mm 用	グリーン	50cm
5240-80L	8.0mm 用	グリーン	100cm

Yタイプ/Iタイプ

カタログ番号	適用サイズ	カテーテル接続部 コネクタカラー	チューブ長
5240-50I	共通	-	50cm
5240-50Y	共通	-	50cm
5240-100I	共通	-	100cm
5240-100Y	共通	-	100cm

【使用目的又は効果】

本品はドレナージカテーテルを延長させて、ポンプに接続するための柔軟性のあるプラスチック製チューブである。
本品は術中の体液等を排出させる際に用いるチューブである。

【使用方法等】


1. 汚染に注意し滅菌袋から本品を取り出す。
2. マルチチャネル ドレナージ カテーテル S のカテーテルの単管部を本品カテーテル接続部に確実に突き当たるまで挿入する。
Y コネクタ/I コネクタの場合、マルチチャネル ドレナージ カテーテル S(認証番号: 227AABZX00089000)に同梱されている接続コネクタにカテーテルを接続し、接続コネクタを Y コネクタ/I コネクタの接続部に接続する。
3. 本品のポンプ接続部をマルチチャネル ドレナージ ポンプの Y コネクタに接続し、ロックリングを締めつける。
4. 本品とカテーテル及びポンプの接続状況を確認後、吸引を開始する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・包装を開封したら、速やかに使用すること。
- ・Y コネクタ/I コネクタ付の場合、カテーテル(別売り)単管部を接続コネクタ(別売り)に接続し、接続コネクタ(別売り)を本品の Y コネクタ/I コネクタに接続し、ロックリングを締めつけること。(図 1)

Y コネクタ

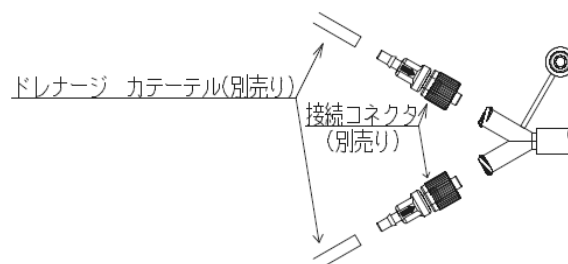

I コネクタ

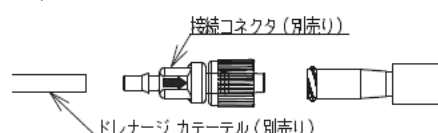


図 1

- ・Yコネクタにおいてカテーテル1本留置の場合、片側をYアダプタキャップで確実に栓をすること。(図2)

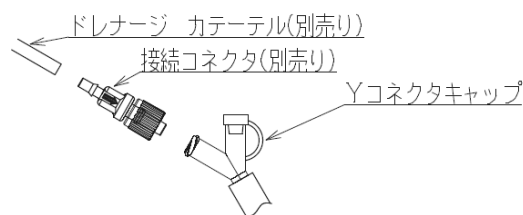


図 2

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本品を折り曲げたり、下積みなどで押しつぶさないよう注意すること。

【使用期限】

- ・包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

**【販売元】

カーディナルヘルス株式会社
電話番号 0120-917-205