

* 2022年3月 改訂（第2版）
2017年2月 作成（第1版）

医療機器届出番号：09B1X00004000153

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

マルチチャネル用チュービングコネクタ

再使用禁止

【警告】


1. 接続部は外れないように確実に取り付けること。
2. 本品を指定した製品以外に取りつけないこと。[指定外の製品を接続すると使用中の外れやリークの原因となる。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品をアルコール等の有機溶剤と接触させないこと。[アルコール含有消毒剤及び脱脂目的によるアセトン等の有機溶剤に接触すると強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

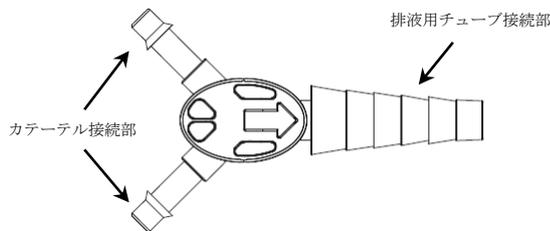

型式	サイズ（カテーテル接続部）	コネクタカラー
5240-65Y	6.5mm 用	クリア
5240-80Y	8.0mm 用	グリーン

- ・別売りのマルチチャネル ドレナージ カテーテルS（認証番号：227AABZX00089000）と吸引器に接続した排液用チューブを接続するためのコネクタである。

【使用目的又は効果】

本品は、排液用のカテーテルをポンプなどの別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

1. マルチチャネル ドレナージ カテーテルSのサイズを確認し、本品のサイズを選択する。
2. 汚染に注意し滅菌袋から取り出す。
3. 本品のカテーテル接続部をマルチチャネル ドレナージ カテーテルSのカテーテル端にしっかり突き当たるまで挿入する。
4. 排液用チューブ接続部に、内径10～13mmの排液用チューブを確実に接続する。
5. 各接続部の接続状況を確認した後、吸引を開始する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・包装を開封したら、速やかに使用すること。
- ・排液中は、常に吸引が維持されていることが必要であり、接続時ならびに排液中は以下の点に十分注意すること。
 - ①接続部または回路からのリーク。[回路外からのエアの流入により、逆行性汚染を生じるおそれがある。また、吸引機能が失われた場合、血腫、血漿腫形成による神経圧迫等から麻痺症状、感染等を生じるおそれがある。]
 - ②本品内の閉塞 [フィブリン、血腫あるいは微細な組織片などによりドレインの閉塞が起こった場合、吸引機能が失われる。吸引機能が失われた場合、血腫、血漿腫形成による神経圧迫等から麻痺症状、感染等を生じるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【使用期限】

- ・包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

*【販売元】

カーディナルヘルス株式会社
電話番号 0120-917-205