

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

ラパロ用吸引チューブ

再使用禁止

【警告】


1. 排煙装置側コネクタをつなぎチューブへ接続する際、外れないように根元まで挿入すること。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品と併用する電気手術用アクセサリは、可燃性麻酔剤、可燃性ガス、可燃性の液体や物質（アルコール性の皮膚消毒剤やチンキ類、乾燥したガーゼ）などが存在する所及び酸素や亜酸化窒素などの支燃性ガスの濃度が高くなっている所では使用しないこと。[引火・爆発による火災の発生や、患者及び手術スタッフに重大な損傷を与えるおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

＜本品の代表図＞

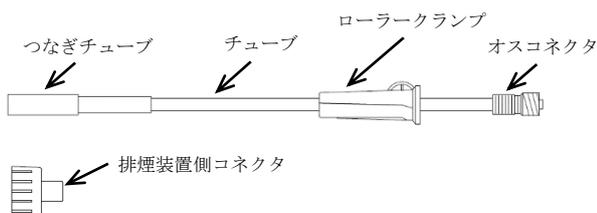

※本品はエチレンオキサイド滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

手術に伴い発生する煙やミストによる視野を改善する目的で使用される排煙用の吸引装置と共に用いる。

* 【使用方法等】

本品はエルベ社製の排煙装置「IES3」と併用すること。
上記以外の排煙装置と併用する場合は、接続が問題ないことを確認してから使用すること。

● 使用方法

1. 汚染に十分に注意し、本品を包装内から取り出す。
2. 本品のつなぎチューブに排煙装置側コネクタを接続する。
(図1)

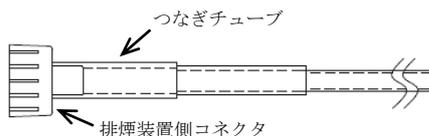


図1

3. 併用する器具の接続部に本品を接続する。
4. 排煙装置側コネクタを併用する排煙装置に取り付ける。
5. 排煙量はローラーランプで調節する。
6. これ以降の操作は、併用する排煙装置の取扱説明書に準ずること。
7. 使用後は、再使用せずに廃棄すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 包装を開封したらすぐに使用すること。
- (2) 使用中は、接続部の緩み、外れ、破損に注意し定期的に確認すること。
- (3) 使用時は過度に引張る等、力が加わらないように注意すること。
- (4) 手術に携わる医師やスタッフは、本品の不具合等により、正常に作動しない可能性があることを予め理解し、予備の製品を準備しておくこと。
- (5) 本品の取扱いには十分注意し、落としたり、ぶつけたり、重いものをのせたり、過大な力を加えたりしないこと。チューブを過剰に折り曲げたり、捻じらないこと。
- (6) 本品、その他の併用機器及び患者に異常がないことを常に監視し、異常が認められた際には、患者に安全な状態で適切な処置を講ずること。
- (7) チューブを閉塞しないこと。[チューブ破断のおそれがある。]

[相互作用]

- (1) 部品の破損が確認された場合は、直ちに別の製品と交換すること。

[不具合・有害事象]

- (1) 不適合接続形状との接続による破損
- (2) 接着部からの漏れ

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801