

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

尿管カテーテル用接続チューブ

再使用禁止

【警告】


1. 接続部 (両端コネクタ) は外れないように確実に取り付けること。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜本品の基本構成＞

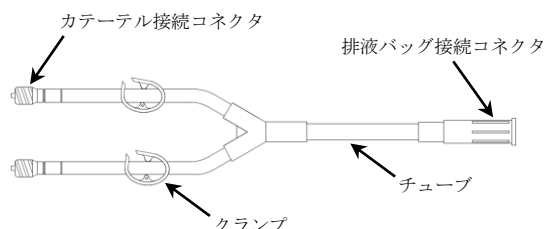

- ・本品はポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)) を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は尿管カテーテルと回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

＊【使用方法等】

1. 本品のクランプを閉じ、カテーテル接続コネクタを尿管カテーテルに接続する。
2. 排液バッグ接続コネクタを排液バッグに接続する。
3. クランプを開き、排液を開始する。

同梱している固定補助テープを用いたチューブの固定方法例


手順1. 固定面側の剥離紙を剥がし、体表に貼りつける。



手順2. 表面側の剥離紙を剥がし、くびれ中央にチューブを置く。




手順3. チューブにテープを巻き込みしっかり密着させる。

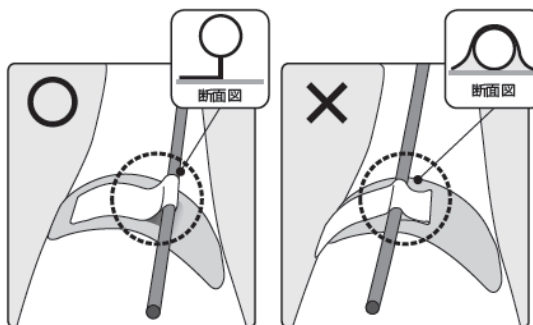

テープがΩの形になるようにチューブを巻き込むこと。

手順4. 保護テープで上からテープを保護する。

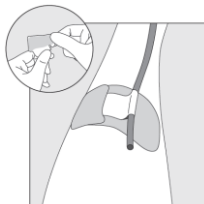

手順5. 固定完了

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・包装を開封したら、速やかに使用すること。
- ・包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- ・チューブを折り曲げた状態、チューブが引っ張られた状態で使用しないこと。[チューブ接合部等の破損、外れが生じるおそれがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本品を折り曲げたり、下積みなどで押しつぶさないよう注意すること。

【使用期限】

- ・包装 (ラベル) に使用期限を表示している。[自己認証による]

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

＊【販売元】

カーディナルヘルス株式会社
電話番号 0120-917-205