

* 2017 年 7 月 改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2012 年 7 月 作成（第 1 版）

医療機器承認番号： 21300BZZ00485000

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 70371000

輸液セット

（DEHPフリー）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止


【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【形状・構造及び原理等】

＜本品の基本構成＞

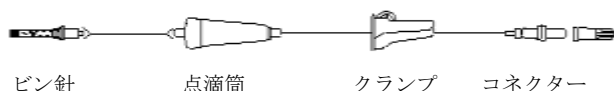

- 本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ（2-エチルヘキシル））を使用している。（フタル酸エステル類の溶出のおそれはない。）
- 品種により、構成部品を追加又は削除する場合がある。

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

- 本品は手技に精通した医師の管理下で使用する。
- 下記の説明は、一般的な使用方法である。従って、細部については医師の臨床経験に基づき、手順の追加、変更が必要である。
 1. 本品のクランプを完全に閉じる。
 2. びん針のカバーを外し、薬液容器の所定の位置にまっすぐ根元まで刺通し、薬液容器をハンガーにつるす。
 3. 点滴筒を軽く指で押しつぶして離すと、薬液が点滴筒内に入る。これを繰り返して、空気混入防止のため点滴筒内の半分程度まで薬液をためる。
 4. クランプを開いて本品の末端まで薬液をゆっくり満たし、空気を完全に除去してクランプを閉じる。
 5. 本品の末端を静脈針等のコネクターに確実に接続する。
 6. クランプを徐々に緩め、点滴を観察しながら流量を調節し輸液を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 接続部は、アルコールを含む薬液等で消毒しないこと。
- 油性の薬剤、アルコールを含む薬剤、脂肪乳剤等を使用する場合は、注意すること。（コネクター部分にひび割れが生じて薬液が漏れる可能性がある。）
- びん針等の針部には直接手を触れないこと。
- プラスチック型ピン針の場合、ゴム栓に対し斜めに刺通したり刺通中に横方向の力を加えないこと。〔びん針に変形または破損が生じる場合がある。〕
- 使用中は接続部分に緩み、液漏れ、詰まり等がないことを定期的に確認すること。
- 使用中に液漏れ、詰まり等の異常が認められた場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【有効期間・使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

フォルテグロウメディカル株式会社

電話番号 0283-22-2801

【販売業者】

株式会社 歯愛メディカル

電話番号：076-278-8802