

** 2017年7月改訂（第5版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2009年8月改訂（第4版）

承認番号：21900BZX00662000

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000

酸素チューブ

【禁忌・禁止】


- 感染症の患者に使用した製品は他の患者に使用しないこと。
- 使用中は火気を近づけないこと。また、高温の場所や燃えやすい物がある所では使用しないこと。[爆発や火災の原因となるため。]

* 【形状・構造及び原理等】

<概要>

本品は人工呼吸器用マスクまたは人工呼吸器呼吸回路と酸素供給源とを接続する酸素用チューブである。

<各部の名称>

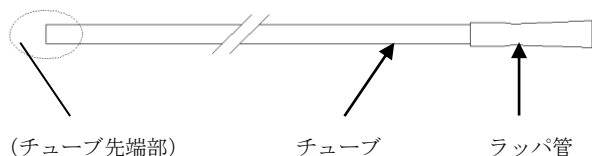

(チューブ先端部)

チューブ

ラップ管

- 本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。
- 本品は未滅菌品です。

* 【使用目的又は効果】

人工呼吸器用マスクまたは人工呼吸器呼吸回路と酸素供給源を接続する。

* 【使用方法等】

- * ●チューブ先端部を人工呼吸器用マスクの酸素ポートまたは人工呼吸器呼吸回路の酸素インレットポートに接続し、ラップ管を酸素供給源に接続して使用する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 使用中は、本人はもちろん、近くにいる人もタバコは吸わないこと。
- 本品は、医師の処方及び指示に従って使用すること。
- 本品は、帝人ファーマ株式会社の取り扱う製品にのみ使用すること。
- 本品と酸素供給源との接続及び取り外しの際は、ラップ管を持って行うこと。
- * ●本品と人工呼吸器用マスクまたは人工呼吸器呼吸回路との接続及び取り外しの際は、チューブ先端部を持って行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

** [使用期限]

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801