

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000

延長チューブ

【禁忌・禁止】


- 感染症の患者に使用した製品は他の患者に使用しないこと。
- 使用中は火気を近づけないこと。また、高温の場所や燃えやすい物がある所では使用しないこと。[爆発や火災の原因となるため。]

【形状・構造及び原理等】

<概要>

本品は経鼻用酸素供給カニューレ等の酸素投与器具と酸素濃縮装置等の酸素供給源とを接続する酸素供給用チューブである。本品のコネクタ部は、補充の目的で単品で販売されることもある。

<各部の名称(代表的な形状図)>

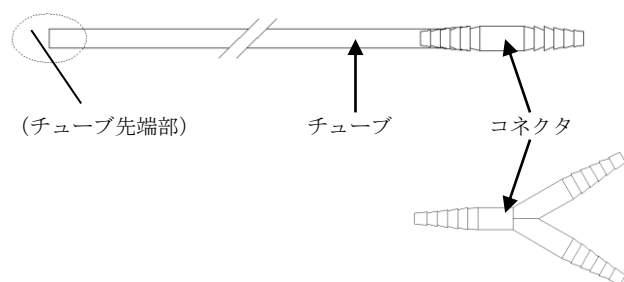

- 本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を使用している。
- 本品は未滅菌品です。

【使用目的又は効果】

経鼻用酸素供給カニューレ等の酸素投与器具と酸素濃縮装置等の酸素供給源とを接続する。

【使用方法等】**

- 延長チューブのコネクタ部を酸素投与器具に接続し、チューブ先端部を酸素供給源に接続して使用する。

**●延長チューブどうしを連結する場合もある。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 使用中は、本人はもちろん、近くにいる人もタバコは吸わないこと。
- 本品は、医師の処方及び指示に従って使用すること。
- 本品は、帝人ファーマ株式会社の取り扱う酸素濃縮器等に使用すること。
- 本品と酸素供給源との接続及び取り外しの際は、チューブ先端部を持って行うこと。
- 本品と酸素投与器具の接続及び取り外しの際は、チューブ先端部と酸素投与器具の先端部を持って行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

包装年月より3年。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801